

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ  
PHÁT TRIỂN GIA MINH**

Số nhà 37, ngách 27/37, Phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng,  
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

<b>Tên trang thiết bị</b>	Bộ dụng cụ vi phẫu lấy, ghép gan và mạch máu
<b>Chỉ định</b>	Sử dụng trong phẫu thuật mổ mở của khoa ngoại – chuyên khoa ghép tạng
<b>Hướng dẫn xử lý khử khuẩn tiệt khuẩn</b>	Phương pháp xử lý sau khi sử dụng/phẫu thuật: Tuân theo hướng dẫn sử dụng khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh (Ban hành kèm theo quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ y tế)
<b>Bảo quản</b>	Bảo quản, tiệt trùng, khử khuẩn phải tuân theo quy định của nhà sản xuất. Các vết bẩn phẫu thuật trên dụng cụ đã khô hoặc bám dính có thể làm cho việc tẩy rửa trở nên khó khăn hoặc không hiệu quả gây ra hiện tượng ăn mòn hoặc gỉ sét.
<b>Cảnh báo</b>	<p>Sử dụng quá liều các hóa chất tẩy rửa hoặc trung tính có thể gây ra các tác dụng hóa học làm mờ hoặc không thể đọc được các dấu hiệu laze trên thép không gỉ bằng mắt thường hoặc bằng máy.</p> <p>Các vết bẩn còn sót lại chứa clo hoặc clorua như các vết bẩn phẫu thuật, thuốc, dung dịch muối và trong nước công nghiệp dùng để tẩy rửa, tiệt trùng sẽ làm ăn mòn bề mặt. Do đó có thể làm hỏng các sản phẩm thép không gỉ. Do vậy, phải tuân thủ các phương pháp tẩy rửa, phương pháp tiệt trùng, các hóa chất phù hợp hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn xử lý thép không gỉ.</p>