

TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	<b>Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>Tên sản phẩm: Muối rửa mũi xoang Dr.Green Pro.</p> <p>- Qui cách đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Hộp 10 gói + 1 chai rửa mũi 250ml</li><li>+ Hộp 30 gói + 1chai rửa mũi 250ml</li><li>+ Hộp 30 gói</li></ul> <p>- Đặc điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Thành phần tự nhiên, không chứa thuốc và chất bảo quản.</li><li>+ Dung dịch muối đẳng trương, pH sinh lý, không gây bỏng rát, khó chịu.</li><li>+ Rửa sạch mũi xoang theo cách tự nhiên và êm dịu.</li><li>+ Dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.</li><li>+ Bình rửa mũi được thiết kế theo cấu tạo van kép giúp bình hoạt động dễ dàng, phù hợp với mọi lứa tuổi, dễ dàng vệ sinh và không lây nhiễm chéo.</li><li>+ Rửa sạch mũi xoang theo cách tự nhiên và êm dịu.</li><li>+ Bình rửa mũi được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi, dễ sử dụng, dễ vệ sinh.</li></ul>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Vỏ hộp, bình rửa 250ml, bia, tem, hướng dẫn sử dụng, vỏ thùng.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	<p>Dùng rửa mũi trong các trường hợp</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khô mũi, ngạt mũi, chảy nước mũi.</li><li>- Các triệu chứng ở mũi do lạnh, cảm cúm, cảm mạo.</li><li>- Dị ứng mũi do bệnh nghề nghiệp, bụi nhà, khói thuốc lá, phấn hoa, ô nhiễm môi trường.</li><li>- Dùng hàng ngày để vệ sinh và giữ ẩm niêm mạc xoang mũi.</li></ul>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p>Bước 1: Thêm nước tinh khiết hơi ấm vào chai rửa mũi đến vạch 240ml (8 Oz).</p> <p>Bước 2: Cắt gói muối và đổ hết lượng muối trong gói vào bình. Đậy và vặn chặt nắp. Lắc nhẹ để hoà tan muối.</p> <p>Bước 3: Đứng trước chậu rửa, đầu hơi cúi thấp, miệng há nhẹ, thở đều bằng miệng. Đặt khít đầu bình rửa vào một bên mũi, bóp nhẹ chai để đẩy nước muối vào mũi và chảy qua đường mũi bên kia.</p> <p>Bước 4: Lặp lại bước trên với bên mũi còn lại (Lưu ý nước muối trong bình còn lại có thể dùng để súc miệng)</p>



		Bước 5: Tráng rửa sạch chai và nắp bằng nước sạch, vẩy khô ráo nước và để nơi khô thoáng.
1.5	Chống chỉ định	
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pha muối bằng nước cất, nước tinh khiết đóng chai, nước lọc qua màng 0,2 Micron, màng R.O hoặc nước đun sôi để nguội, ở nhiệt độ hơi ấm, gần với cơ thể.</li> <li>- Không dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh để rửa mũi.</li> <li>- Luôn dùng gói muối Dr.Green Pro kèm với bình rửa mũi chuyên dụng hãng Dr.Green để pha đúng nồng độ và đảm bảo hiệu quả điều trị tốt nhất.</li> <li>- Không dùng muối ăn tự pha để rửa mũi, vì dung dịch muối ăn không đúng nồng độ có thể kém tác dụng, thậm chí làm tăng ngạt mũi, có thể chứa các tạp chất không an toàn cho niêm mạc mũi.</li> </ul>
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	
2	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)</b>	
3	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)</b>	
4	<b>Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú.</li> <li>- Phù hợp với mọi lứa tuổi.</li> </ul>	

**Đại diện hợp pháp của cơ sở**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
**DR NATURAL**  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Quang Hùng*

