



Miếng dán mắt

Mô tả sản phẩm

Miếng dán mắt bao gồm một miếng đệm không dính mềm kết dính với miếng lót thoáng khí thân thiện với da và mặt sau được phủ một lớp keo không gây dị ứng. Miếng dán thoáng khí và phù hợp với cơ thể.

Mục đích sử dụng

Miếng dán mắt này được sử dụng cho trường hợp nhược thị và tật lác mắt (bệnh mắt lác) ở trẻ em.

Chống chỉ định

Không có


Cách dùng

Dán miếng dán mắt

1. Để có độ dính tốt nhất, trước tiên hãy rửa sạch và làm khô da. Tháo bỏ lớp giấy của miếng dán mắt
2. Nhẹ nhàng nhắm cả hai mắt, giữ cho cơ mặt thư giãn, không nhắm mắt khi dán
3. Dán miếng dán mắt với phần hẹp hơn ở mũi. Không kéo căng miếng dán, hoặc kéo da khi dán
4. Cố định miếng dán bằng cách miết nhẹ bằng đầu ngón tay xung quanh bên ngoài miếng dán mắt.

Tháo bỏ miếng dán

1. Ở phía mũi của miếng dán mắt, nắm và nới lỏng mép ngoài của miếng dán mắt.
2. Giữ da bằng ngón tay. Tháo băng thấp và chậm, lột miếng dán mắt về phía tai, giữ nó sát bề mặt da và kéo lại chính nó. Lưu ý rằng việc gỡ miếng dán mắt ở một góc sẽ kéo bề mặt da và làm tăng nguy cơ đỏ và kích ứng.
3. Khi miếng dán được lột bỏ, tiếp tục hỗ trợ vùng da mới lộ ra

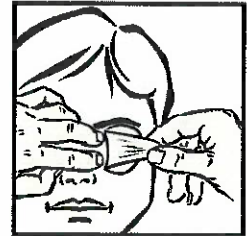

Cảnh báo và thận trọng

- Sử dụng Miếng dán mắt theo hướng dẫn của chuyên gia chăm sóc mắt.
- Khi có bất kỳ phản ứng về da, lập tức ngừng sử dụng miếng dán và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Đối với những bệnh nhân có làn da nhạy cảm, chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng miếng dán mắt Opticludé Silicone.
- Sản phẩm tái sử dụng không đáp ứng được yêu cầu và không thể được sử dụng như chỉ định

Bảo quản/sử dụng

Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Hạn sử dụng: xem trên bao bì sản phẩm