

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GHẾ KHÁM PHỤ KHOA GRACIE



## Tính năng:

- Di chuyển phần lưng, phần chân và chiều cao được điều khiển bằng các motor
- Các vị trí được điều khiển bằng điều khiển cầm tay
- Tay cầm hai bên có thể điều chỉnh được
- Phần tựa chân có thể điều chỉnh, khay đựng chất thải làm bằng inox không gỉ hoặc nhựa
- Có thể lựa chọn màu sắc của ghế
- Kệ ghế có bánh xe để dàng di chuyển

## Kích thước ghế


- Chiều cao tối đa: 1150 mm
- Chiều rộng tối đa: 760 mm
- Chiều dài tối đa: 1780 mm
- Trọng tải tối đa: bệnh nhân: 180 kg, khả năng chịu lực tối đa: 210 kg

## Hướng dẫn sử dụng:

- B1: Bật nguồn
- B2: Bệnh nhân ngồi lên ghế
- B3: Chọn chế độ ghế ( độ cao, góc phù hợp với mục đích thăm khám của bác sỹ)
- B4: Điều chỉnh độ cao, góc nếu cần trong quá trình thăm khám

- B5: Tiến hành thăm khám
- B6: Kết thúc quá trình thăm khám
- B7: Tắt nguồn.

#### **Điều khiển cầm tay:**

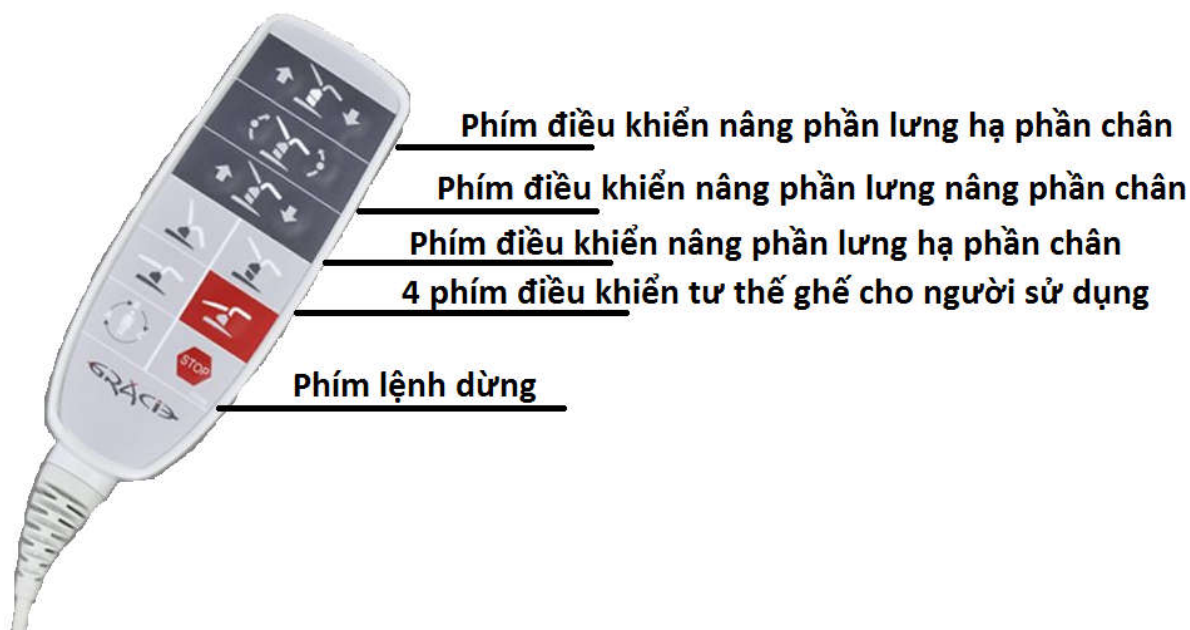

#### **Hướng dẫn bảo quản:**

- Phải luôn giữ cho ghế khám được sạch sẽ
- Sử dụng vải ẩm để lau sạch ghế khám
- Phải lau khô ghế khám sau khi vệ sinh xong
- Không cần bảo dưỡng thường xuyên

#### **Chú ý an toàn:**

- Ghế khám chỉ được sử dụng cho một bệnh nhân, không sử dụng quá tải trọng của ghế
- Không đặt tay dưới ghế khám khi các tay quay đang hoạt động