



ALFASEPT®
Effective Infection Prevention & Control

ALFASEPT WD-Z

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

THÀNH PHẦN

Enzyme protease 5%, chất hoạt động bề mặt ethoxylate 8%.

CHỈ ĐỊNH

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chịu nhiệt và không chịu nhiệt, thiết bị phòng thí nghiệm, phù hợp sử dụng cho quá trình làm sạch bằng tay, máy rửa khử khuẩn, máy rửa dụng cụ tự động.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lựa chọn chương trình làm sạch trên máy rửa phù hợp.

Tỷ lệ pha loãng khuyến cáo: 1-10ml/l. Tham khảo thêm tỷ lệ pha loãng của nhà sản xuất thiết bị máy rửa khử khuẩn và máy rửa siêu âm.

THÔNG TIN CẢNH BÁO

Sản phẩm gây kích ứng mắt nhẹ, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu nuốt phải dung dịch có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đau bụng, nhức đầu, buồn nôn.

BIỆN PHÁP CỨU CỨU BAN ĐẦU

Trường hợp tiếp xúc trực tiếp xúc với mắt: Rửa ngay với nhiều nước sạch và tìm tư vấn y tế.

Nếu nuốt phải: Rửa sạch miệng và tìm tư vấn bác sĩ, mang theo tem nhãn sản phẩm hoặc can dung dịch.

Nếu có triệu chứng khó thở: Chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí, chăm sóc y tế kịp thời.

KHUYẾN CÁO

Sản phẩm chỉ dùng ngoài.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.

Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.

HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất.



ALFASEPT WD-Z

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

- Hiệu quả loại bỏ biofilm
- Dễ dàng làm sạch các vết máu kết khô
- Tương thích với nhiều vật liệu khác nhau
- Sản phẩm ít bọt, mùi hương dễ chịu



7L

Mô tả sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Số 10, B. Chu Văn An, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
P. Kèo Quàng - TP. Vinh Yên T. Vinh Phúc
Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108
Website: www.lavitec.vn

Đơn vị phân phối
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC
Số 10, B. Chu Văn An, Phường 10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
P. Kèo Quàng - TP. Vinh Yên T. Vinh Phúc
Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108
Website: www.lavitec.vn

SGK :
Mã SP :
LOT :
NSX :





ALFASEPT®
Effective Infection Prevention & Control

ALFASEPT

WD-Z

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

- Hiệu quả loại bỏ biofilm
- Dễ dàng làm sạch các vết màu kết khô
- Tương thích với nhiều vật liệu khác nhau
- Sản phẩm ít bọt, mùi hương dễ chịu

ALFASEPT WD-Z

ALFASEPT®
Effective Infection Prevention & Control

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế

Thành phần

Enzyme protease 5%, chất hoạt động bề mặt ethoxylate 8%.

Chỉ định

Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chịu nhiệt và không chịu nhiệt, thiết bị phòng thí nghiệm, phụ hợp sử dụng cho quá trình làm sạch bằng tay, máy rửa khử khuẩn, máy rửa dụng cụ tự động.

Hướng dẫn sử dụng

Lựa chọn chương trình làm sạch trên máy rửa phù hợp.

Tỷ lệ pha loãng khuyến cáo: 1-10ml/l. Tham khảo thêm tỷ lệ pha loãng của nhà sản xuất thiết bị máy rửa khử khuẩn và máy rửa siêu âm.

Thông tin cảnh báo

Sản phẩm gây kích ứng mắt nhẹ, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu nuốt phải: dung dịch có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đau bụng, nhức đầu, buồn nôn.

Biện pháp cấp cứu ban đầu

Trường hợp dung dịch tiếp xúc với mắt: Rửa ngay với nhiều nước sạch và tìm tư vấn y tế.

Nếu nuốt phải: Rửa sạch miệng và tìm tư vấn bác sĩ, mang theo tem nhãn sản phẩm hoặc can dung dịch.

Nếu có triệu chứng khó thở: Chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí, chăm sóc y tế kịp thời.

Khuyến cáo

Sản phẩm chỉ dùng ngoài.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.
Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.
Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.

HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất.



ISO 13485:2015

SDK :
Mã SP :

LOT :
NSX :



8 93 6060 880240

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC.**
Địa chỉ: Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vinh Yên, Vinh Phúc.
Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108. Website: www.lavitec.vn
Đơn vị phân phối: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC.**
Địa chỉ: Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vinh Yên, Vinh Phúc.
Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108. Website: www.lavitec.vn

5L