

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ ALFASEPT PREZYME

Hướng dẫn sử dụng:

- Mang khẩu trang và đồ bảo hộ phù hợp khi sử dụng sản phẩm.
- Dụng cụ nhiễm bẩn sau quá trình sử dụng được đặt lên khay đựng phù hợp. Xịt sản phẩm ALFASEPT PREZYME bao phủ lên toàn bộ bề mặt dụng cụ.
- Di chuyển dụng cụ tới khu vực xử lý dụng cụ và tiến hành quá trình làm sạch.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG ĐẠT