



**ALFASEPT®**  
Effective Friction Prevention & Control

## ALFASEPT PREZYME

Dung dịch chống đông màu và làm sạch cho dụng cụ y tế sau phẫu thuật



• Đặc biệt phù hợp với dụng cụ nhiễm bẩn vừa và nặng

• Sử dụng ngay, không cần pha loãng

• pH trung tính, không gây ăn mòn

• Tương thích các loại vật liệu kim loại, nhựa, thủy tinh và cao su

• Phân hủy sinh học

• Không chứa dung môi bay hơi



**750 ML**

## ALFASEPT PREZYME

### THÀNH PHẦN

Enzyme: Amylase, lipase, polycrylate <1%.

### CHỈ ĐỊNH

Dùng để chống đông máu và làm sạch dụng cụ phẫu thuật và nội soi, trước quá trình làm sạch bằng phương pháp rửa nhiệt độ cao.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mang khẩu trang và găng tay

Dùng để làm sạch sản phẩm, tránh sử dụng được đặt lên khay đựng phụ trợ. Xì sản phẩm

ALFASEPT PREZYME bao phủ, làm sạch và rửa sạch dụng cụ.

### THÔNG TIN CẢNH BÁO

Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu nước phải có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đau bụng, nhức đầu, buồn nôn.

### BIỆN PHÁP CẤP CỨU BAN ĐẦU

Trường hợp dùng dịch tiếp xúc với mắt: Rửa ngay với nhiều nước sạch và tìm tư vấn y tế. Nếu nước phải: Rửa sạch miệng, tìm tư vấn bác sĩ, mang theo tem nhãn của sản phẩm hoặc can đựng dịch.

Nếu nuốt phải: Rửa sạch miệng, tìm tư vấn bác sĩ, mang theo tem nhãn của sản phẩm hoặc can đựng dịch.

Nếu có triệu chứng khó thở và ngộ độc: Chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí, chiam bác y tế kịp thời.

### KHUYẾN CÁO

Sản phẩm chỉ dùng ngoài.

Tránh xa tầm tay của trẻ em.

### BAO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.

**Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.**

### Mục sản xuất

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC**

Địa chỉ: Lô B - Khu B - KCN Công Nghệ - Phường Tân Phú - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108

Website: www.lavitec.vn

### Đơn vị phân phối

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC**

Địa chỉ: Lô B - Khu B - KCN Công Nghệ - Phường Tân Phú - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108

Website: www.lavitec.vn

### SDK :

### Mã SP :

### LOT :

### NSX :





**ALFASEPT®**  
Effective Infection Prevention & Control

## ALFASEPT PREZYME

Dung dịch chống đông máu và làm sạch cho dụng cụ y tế sau phẫu thuật



- Đặc biệt phù hợp với dụng cụ nhiễm bẩn vừa và nặng
- Sử dụng ngay không cần pha loãng
- p-H trung tính, không gây ăn mòn
- Tương thích các loại vật liệu kim loại, nhựa, thủy tinh và cao su
- Phân hủy sinh học
- Không chứa dung môi bay hơi

5L

## ALFASEPT PREZYME

**ALFASEPT®**  
Effective Infection Prevention & Control

Dung dịch chống đông máu và làm sạch cho dụng cụ y tế sau phẫu thuật

### THÀNH PHẦN

Protease, amylase, lipase, polyacrylate <1%.

### CHỈ ĐỊNH

Dung dịch chống đông máu và làm sạch dụng cụ phẫu thuật và nội soi, trước quá trình làm sạch bằng tay hoặc bằng máy, đặc biệt phù hợp khi quá trình làm sạch dụng cụ bị trì hoãn.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mang khẩu trang và găng tay.  
Dụng cụ nhiễm bẩn sau quá trình sử dụng được đặt lên khay đựng phù hợp. Xịt sản phẩm ALFASEPT PREZYME bao phủ lên toàn bộ bề mặt dụng cụ.  
Di chuyển dụng cụ tới khu vực xử lý dụng cụ và tiến hành quá trình làm sạch.

### THÔNG TIN CẢNH BÁO

Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt, tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt. Nếu nuốt phải có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đau bụng, nhức đầu, buồn nôn.

### BIỆN PHÁP CẤP CỨU BAN ĐẦU

Trường hợp dung dịch tiếp xúc với mắt: Rửa ngay với nhiều nước sạch và tìm tư vấn y tế.  
Nếu nuốt phải: Rửa sạch miệng, tìm tư vấn bác sĩ, mang theo tem nhãn của sản phẩm hoặc can dung dịch.  
Nếu có triệu chứng khó thở và ngộ độc: Chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí, chăm sóc y tế kịp thời.

### KHUYẾN CÁO

Sản phẩm chỉ dùng ngoài.  
Tránh xa tầm tay trẻ em.

### BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.  
Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.  
Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.  
**Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.**



ISO 9001:2015

SDK :  
Mã SP :  
LOT :  
NSX :



8 936060 888239

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC.**  
Địa chỉ: Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vinh Yên, Vinh Phúc.  
Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108, Website: www.lavitec.vn  
Đơn vị phân phối: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC.**  
Địa chỉ: Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, P. Khai Quang, TP. Vinh Yên, Vinh Phúc.  
Điện thoại: 0211 3712 107 - Fax: 0211 3712 108, Website: www.lavitec.vn

5L