

Số: 001/VL/HDSĐ

TP. Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TTB Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

1. Công dụng :

Là thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học, dùng để phân tích các chỉ số tế bào máu dựa trên nguyên lý đo trở kháng , tích hợp với điện tử, quang học và cơ học.

Các thông số chính đo là :

WBC (Số lượng bạch cầu) và thành phần của Bạch Cầu

RBC (Số lượng Hồng Cầu) và thành phần của Hồng Cầu

HGB (Huyết sắc tố) và thành phần của huyết sắc tố

PLT (Số lượng Tiểu Cầu) và thành phần của Tiểu Cầu

2. Hướng dẫn sử dụng:

Đặt thiết bị và các thuốc thử(hóa chất) trên mặt phẳng bàn đỡ , khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm làm việc.

+ Nối máy với nguồn đúng quy định

+ Kết nối bộ thuốc thử với máy xét nghiệm

+ Bật máy để khởi động

+ Máy chạy chương trình khởi động xong và sau đó máy tự chạy background (Mẫu trắng) , kết quả chạy ra đạt cho phép thì ta tiến hành chạy kiểm tra mẫu nội kiểm

+ Sau khi chạy mẫu kiểm tra đạt thì ta tiến hành chạy mẫu bệnh phẩm

+ Sau khi kết thúc chạy mẫu cuối ngày ta cho máy thực hiện làm chạy chương trình rửa máy cuối ngày

+ Mọi thao tác vận hành máy đều đảm bảo theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của hãng



3. Cảnh báo:

Chỉ được sử dụng bởi những nhân viên đã được đào tạo.

Dùng găng tay theo quy định của bệnh viện khi thực hiện xét nghiệm.

Điều kiện bảo quản: để trên bề mặt phẳng, tránh ánh nắng mặt trời, 15°C ~ 30°C, độ ẩm < 80%.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thùy Chi

