



Công ty TNHH MTV
Shimadzu Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hướng dẫn sử dụng, bảo quản Phim X-quang dùng trong y tế

Bảo quản phim chưa sử dụng

1. Sau khi phim được đóng gói, việc bảo quản phim chưa sử dụng, tương tự như bảo quản phim thông thường: ở nơi mát, tối (nhiệt độ: $10-23^{\circ}\text{C}$ ($50-74^{\circ}\text{F}$), nơi không bị ảnh hưởng bởi tia bức xạ.
2. Nếu phim được bảo quản ở nơi nhiệt độ trên 30°C (86°F) trong thời gian dài, chất lượng và hạn sử dụng của phim có thể thay đổi.

Bảo quản phim đã in (ảnh)

1. Bảo quản, lưu trữ ở nơi mát (không có ánh sáng mạnh).
2. Nếu phim được lưu trữ ở nhiệt độ 40°C (104°F) hoặc cao hơn, điều này có thể gây ra thay đổi mật độ phim hoặc phai màu chỉ sau một thời gian ngắn.