

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
SẢN PHẨM VIÊM XOANG TRIỆU QUANG**

1. THÀNH PHẦN

Sản phẩm viêm xoang Triệu Quang gồm các thành phần cấu tạo:

1. Bình xịt phun sương dung dịch được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp bình, thân bình, ống dẫn.
2. Dung dịch vệ sinh mũi được chứa trong bình xịt phun sương dung dịch với công thức Điều chế cho 100ml thành phẩm:

| TT | Thành phần | Hàm lượng/100ml |
|----|------------------------|-----------------|
| 1. | Chiết xuất Tân di | 20ml |
| 2. | Chiết xuất kim ngân | 20ml |
| 3. | Chiết xuất mộc miết tử | 20ml |
| 4. | Nước cất vừa đủ | 100ml |

Phụ liệu: tòi, hoàng đằng, bạch chỉ.

2. CÔNG DỤNG

Dùng trong những trường hợp.

- Viêm mũi dị ứng, xoang mãn tính,viêm đa xoang, xoang trầm, xoang sàng trước, xoang xương bướm, xoang chán,xoang hàm,đào thải chất nhầy và hoại tử các hốc xoang ra ngoài, nghẹt mũi, khó thở, sát khuẩn, kháng viêm, hoạt huyết, thông thoáng dễ thở, hơi thở hôi, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh hô hấp trên.

- Viêm tai giữa.

3. CÁCH DÙNG

- Lắc nhẹ bình xịt, đưa nhẹ vòi phun vào mũi cho vừa khít, ấn nhanh gọn vòi xịt, dung dịch dạng sương sẽ đi sâu vào khoang mũi.

- Xịt mỗi bên một lần, xịt 4-6 lần/ngày

- Trẻ dưới 2 tuổi dùng tăm bông thấm vào thành mũi khi sử dụng sản phẩm.

- Viêm tai giữa : xịt thẳng vào tai sau đó dùng tăm bông vệ sinh.

- Sản phẩm an toàn khi sử dụng lâu dài cho trẻ em từ trên 03 tháng tuổi

4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

- Trẻ em dùng phải có người lớn hướng dẫn.

- Chỉ sử dụng cho trẻ em từ trên 03 tháng tuổi và trẻ dưới 2 tuổi dùng tăm bông thấm vào thành mũi khi sử dụng sản phẩm.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

6. BẢO QUẢN

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp tránh làm nhiễm bẩn đầu xịt.
- Không tái sử dụng chai xịt và đầu xịt.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Hồng Phát

Địa chỉ: Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Địa chỉ sản xuất: Thôn Thăng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

