

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SẢN PHẨM XỊT MŨI NANO SPRAY UK

1. THÀNH PHẦN

SẢN PHẨM XỊT MŨI NANO SPRAY UK gồm các thành phần cấu tạo:

1. Bình xịt phun sương: được làm bằng nhựa PE, cấu tạo gồm 03 bộ phận: Nắp bình, thân bình, ống dẫn.
2. Dung dịch vệ sinh mũi được chứa trong bình xịt phun sương với công thức Điều chế cho 100ml thành phẩm:

TT	Thành phần	Khối lượng/100ml
1.	Nano bạc	0.05g
2.	Tinh dầu bạc hà	0.005g
3.	Tinh dầu kinh giới	0.01g
4.	Nacl	0.9g
5.	Kẽm Sulfat	0.05g
6.	Benzakonium Chloride	0.005g
7.	Nước cất vừa đủ	100ml






2. CÔNG DỤNG

- Vệ sinh mũi hàng ngày, loại bỏ gỉ mũi, chất nhày, giúp làm sạch và thông mũi.
- Phòng ngừa sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang.
- Tăng cường kháng khuẩn, kháng viêm, thông mũi, phòng ngừa viêm mũi

3. CÁCH DÙNG

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
- Đặt nhẹ nhàng vòi phun vào bên mũi.
- Xịt nhanh đầu phun từ 2-3 lần mỗi bên mũi.
- Để dung dịch dư kéo chất nhày chảy ra ngoài và hỉ mũi
- Lau sạch, khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ.
- Xịt 3-5 lần mỗi bên mũi, 3-6 lần/ngày, hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.

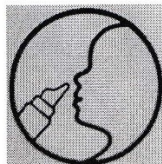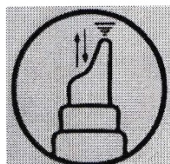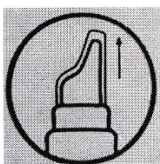

4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

Sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của dung dịch xịt mũi.

6. BẢO QUẢN

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng

CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 22, ngõ 102 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0984454666

Website:

Sản xuất tại: Công ty TNHH liên doanh dược phẩm RIO PHARMACY -
Lô Km24, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chi Thanh

