

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: Công ty cổ phần 24 Seven Healthcare Việt Nam

Địa chỉ: 17 Phạm Văn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TPHCM.

TPHCM Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Tên thiết bị: VẬT LIỆU NHỰA ĐỆM HÀM GIÁ

Model: DIL

Hãng sản xuất: KAMEMIZU CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

Nước sản xuất: JAPAN

Hướng dẫn sử dụng:

- Làm nhám nền hàm bằng mũi khoan Carbide ít nhất 1mm
- Bôi lớp Top Coast lên nền hàm
- Trộn bột và nước theo tỉ lệ nhà sản xuất xong cho vào nền hàm
- Đưa vào miệng vận động môi má lưỡi và nuốt.
- Dùng tay lấy bột phân nhựa dư tràn ra bên ngoài.
- Chờ từ 5 đến 7' để nhựa chuyên sang trạng thái dẻo xong lấy ra ngoài.
- Dùng dao mổ hoặc mũi Silicone lấy phần nhựa dư.
- Quét lên 01 lớp New TopCoat cách ly
- Rửa dưới vòi nước.
- Cho vào miệng bệnh nhân
- 15 đến 20 ngày sau hẹn BN trở lại đánh bóng hoàn tất

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu



Giám Đốc
Trương Văn Bình