

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở: Công ty cổ phần 24 Seven Healthcare Việt Nam

Địa chỉ: 17 Phạm Văn, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TPHCM.

TPHCM Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Tên thiết bị: VẬT LIỆU SỬA CHỮA HÀM GIÁ

Model: PERI RESINE II

Hãng sản xuất: KAMEMIZU CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

Nước sản xuất: JAPAN

Hướng dẫn sử dụng:

- Làm nhám nền hàm hoặc khay cá nhân bằng mũi khoan Carbide ít nhất 1mm
- Bôi lớp Top Coat lên nền hàm
- Cho bột và nước theo tỉ lệ nhà sản xuất vào Syringes rồi trộn đều.
- Bơm nhựa vừa trộn lên vùng làm việc.
- Dùng tay thấm nước tạo hình vùng làm việc.
- Đưa vào miệng vận động môi má lưỡi.
- Sau khi cứng hẳn dung mũi khoan làm láng và hoàn tất 15 đến 20 ngày sau hẹn BN trở lại đánh bóng hoàn tất.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018*

**Đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu**



**Giám Đốc**  
*Trương Văn Linh*