



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ Y TẾ

Làm sạch dụng cụ:

- Dụng cụ cần được tháo rời, đưa vào ngâm rửa bằng máy hoặc bằng tay.
- Lưu ý xả rửa cả phần rỗng trong của dụng cụ (nếu có)
- Dùng bàn chải mềm trà nhẹ để làm sạch dụng cụ
- Dùng dịch tẩy rửa ở nồng độ thích hợp theo qui định của nhà sản xuất

Khử trùng:

- Có thể khử trùng bằng thiết bị hấp âm hoặc nhiệt hoá học
- Có thể kết hợp dung dịch làm sạch và khử trùng trong cùng một giai đoạn
- Việc rửa làm sạch và khử trùng phải tuân theo qui trình thực hành Y tế

Làm khô:

- Nhiệt độ sấy khô có thể vượt quá 120 độ C

Bảo quản:

- Một số dầu bôi trơn trong khi phẫu thuật như paraffin, silicon cần được làm sạch sau khi phẫu thuật.
- Các dụng cụ đã được làm sạch cần để riêng
- Kiểm tra để đảm bảo dụng cụ không bị cong vênh, méo, móp, cùn, gãy mũi
- Cần bôi dầu làm trơn các khớp xoay, khoá của dụng cụ

Hấp tiệt trùng:

- Dụng cụ có chất liệu khác nhau nên được hấp riêng
- Hấp âm ở nhiệt độ 134 độ C, áp suất 304KpA trong vòng 10 phút
- Hộp hấp được mở ra sau khi làm mát xuống dưới 80 độ C

Một số chú ý:

- Đơn vị sử dụng có trách nhiệm đào tạo và thực hiện qui trình tiệt trùng đúng với qui tắc thực hành Y tế.
- Không sử dụng bàn chải cứng, bàn chải kim loại để chà rửa dụng cụ
- Nước rửa và hấp dụng cụ phải không có ion Cl(+) để tránh gây ăn mòn bề mặt dụng cụ
- Tránh sử dụng dung dịch kiềm hoặc axit có độ Ph<6 với các dụng cụ có thành phần là nhôm hoặc hợp kim nhôm
- Các loại mũi khoan carbide không được rửa bằng máy
- Tránh các chất kiềm và oxy hoá cao như Peracetic acid, sodium hypochlorite với các dụng cụ có hợp chất Niken