


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐAI NẸP ĐẦU GỐI KHÓA SỐ DR-K016

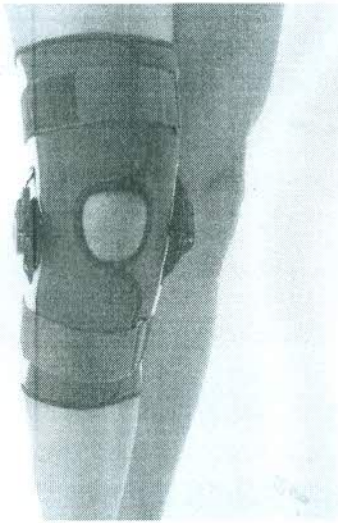

CHỈ ĐỊNH

- Cố định và phục hồi sau phẫu thuật đầu gối, tổn thương sụn nặng, chấn thương dây chằng nghiêm trọng.

TÍNH NĂNG


Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho người có tổn thương, bệnh lý về vùng đầu gối.

Hệ thống khóa chân quay số để cố định và ổn định khớp gối. Giới hạn mở rộng ở: 0 ~ 90° Giới hạn uốn ở: 0 ~ 135°.

Giữ ấm và tạo độ nén tuyệt vời trên vùng đầu gối. Mang dễ dàng và đơn giản theo kiểu quần mở hoàn toàn. Bản khóa gia cố hai bên giúp ổn định với hạn chế chuyển động đầu gối. Dây đeo trên và dưới tạo sự thoải mái và phù hợp tối đa của người dùng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đeo đai vào vùng cần điều trị, cố định đai bằng miếng dán phía trên và dưới đầu gối và điều chỉnh bằng khóa pin bên gối sao cho phù hợp với người sử dụng.

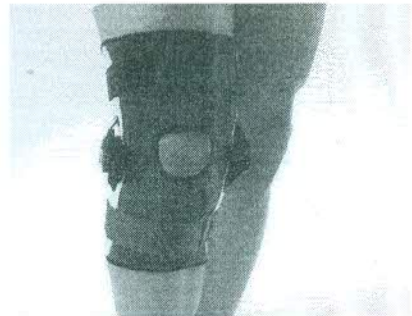

SIZE

Measure	S	M	L	XL	2XL
Upper Circumference(Cm)	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
Lower Circumference(Cm)	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Tổng Giám đốc



ĐS. Trịnh Đào Cung