

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÃNG SẢN XUẤT: ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GMBH/CHLB ĐỨC

1. Chuẩn bị phương tiện trước khi sử dụng

- Kiểm tra dụng cụ có phù hợp với yêu cầu sử dụng hay không, đảm bảo dụng cụ không bị hư hỏng, không có vết trầy xước hoặc các khiếm khuyết bề mặt dụng cụ.
- Hấp tiệt trùng trước khi sử dụng.

2. Làm sạch/ khử trùng sau khi sử dụng bằng tay

- Chuẩn bị dung dịch khử khuẩn, khăn lau, vải mềm, găng tay sạch.
- Máu, mô, mảnh vỡ tế bào hoặc nước muối, dung dịch các loại phải được lấy ra khỏi dụng cụ ngay sau khi sử dụng (tốt nhất trong vòng 2 giờ).
- Ngâm dụng cụ phẫu thuật vào thùng/ xô đựng dung dịch khử khuẩn trong 5-10 phút
- Tráng dụng cụ phẫu thuật bằng nước sạch.
- Sử dụng dung dịch muối đẳng trương để làm sạch.
- Làm sạch bề mặt dụng cụ bằng vải mềm, ẩm, không có sợi cứng. Không làm sạch dụng cụ bằng cách sử dụng bàn chải kim loại hoặc giẻ sắt.
- Vị trí khớp nối phải được làm sạch/ khử trùng ở vị trí mở để đảm bảo rằng các khe, rãnh và các thiết bị khác được làm sạch/ khử trùng.
- Đối với kim, kẹp và dụng cụ ống cần phải hút và xả chất lỏng nhiều lần và thổi khô bằng không khí, cần thận kiểm tra để không có chất lạ bên trong dụng cụ.
- Sử dụng chất tẩy rửa axit hoặc kiềm hoặc bất kỳ chất mài mòn nào để làm sạch tay cầm bằng nhôm.

3. Làm sạch/ khử trùng tự động

- Đặt dụng cụ vào máy khử trùng, tránh các dụng cụ va chạm vào nhau
- Đóng nắp máy, chọn chương trình và bắt đầu khử trùng
- Hoàn tất chương trình, lấy các dụng cụ ra khỏi thiết bị khử trùng

4. Đóng gói, bảo quản thiết bị

- Đóng gói các dụng cụ trong túi tiệt trùng (có niêm phong) hoặc hộp khử trùng có thể tái sử dụng
- Dụng cụ phải được bảo quản trong bao bì khử trùng sau khi khử trùng trong môi trường sạch và khô, đảm bảo các đặc tính hoạt động của dụng cụ không bị tổn hại

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2019

