

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ DỤNG CỤ RỬA MŨI "CARE UP"

Bước 1: Rửa tay, đổ nước sạch (tinh khiết, lọc, đun sôi để nguội hoặc ấm (37°C) vào bình đến vạch 150ml; 200ml; 300ml; 500ml. Pha 1 gói muối vào bình, lắc đều cho tan hết.

Bước 2: Đứng thẳng, đầu hướng xuống bồn rửa, há miệng và chỉ thở bằng miệng. Đặt đầu vòi xịt vào 1 bên lỗ mũi, bóp giữ bình để dung dịch chảy từ bình vào mũi từ bên này sang bên kia đến khi hết ½ bình. Xi mũi thật nhẹ nhàng để loại bỏ dung dịch trong mũi. Lặp lại động tác cho bên mũi còn lại.

Bước 3: rửa sạch bình và để kho sau khi sử dụng

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn cảm với bất kỳ nào thành phần của sản phẩm

Bảo quản: nơi khô ráo, nhiệt độ phòng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để tra cứu thêm thông tin về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng vui lòng liên hệ phân phối hoặc truy cập website: www.careup.vn

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đại