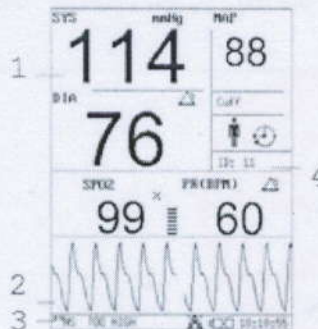


**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 MÁY ĐO SpO2
 MÁY ĐO SpO2 VÀ HUYẾT ÁP**










Model: MM3, MO1
 Hãng sản xuất: Mediblu/ USA






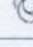



- 1- Thông số đo
- 2- Dạng sóng/ Bảng trend dữ liệu/ Danh sách báo động
- 3- Hiện thị thông tin
- 4- Địa chỉ bệnh nhân





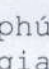
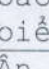

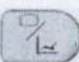




CÁC BIỂU TƯỢNG

	Đang dùng Pin
	Đang dùng điện AC
	Kết nối miệng
	Ngắt kết nối miệng
	Báo động trung bình/ thấp
	Báo động cao
	Tắt âm báo động
	Tạm dừng âm báo
	Tắt báo động

	Bệnh nhân người lớn
	Bệnh nhân trẻ em
	Bệnh nhân sơ sinh
	NIBP thủ công
	NIBP định thời
	NIBP liên tục
	Nhịp tim
ID	Địa chỉ bệnh nhân
18: 18: 55	Thời gian thực



CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

PHÍM	CHỨC NĂNG
ON/ OFF 	<p>Ấn để khởi động thiết bị</p> <p>Ấn giữ 3 giây để tắt thiết bị</p> <p>Ấn giữ ít hơn 1 giây để vô Sleep Mode</p>
Silence 	<p>Ấn và giữ ít hơn 2 giây để tạm dừng âm báo động 2 phút, xuất hiện biểu tượng . Ấn lại hoặc hết thời gian tạm dừng âm báo, âm báo động tự báo lại.</p> <p>Ấn và giữ hơn 2 giây để tắt âm báo động (bao gồm âm báo động, âm bàn phím, âm báo nhịp tim) xuất hiện biểu tượng . Ấn lại để mở lại âm báo động.</p>
NIBP START/STOP 	Ấn 1 lần để tiến hành đo huyết áp. Trong quá trình bơm khí vào túi huyết áp, ấn để dừng bơm.
TREND/WAVEFORM 	Ấn 1 lần để thay đổi màn hình hiển thị dạng danh sách dữ liệu
RECORD 	Ấn 1 lần để in kết quả đo hoặc danh sách báo động
MENU 	Ấn để vào màn hình cài đặt
UP 	Di chuyển các mục trong Menu và chọn. Tăng hoặc giảm giá trị. Xác nhận bằng phím Ok
OK 	
DOWN 	



Đặng Xuân Hùng
GIÁM ĐỐC

