

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ dụng cụ hỗ trợ thay khớp nhân tạo



1. **Lĩnh vực ứng dụng:** Là sản phẩm hỗ trợ phẫu thuật viên trong quá trình thay khớp háng cho bệnh nhân
2. **Lưu ý:** Hướng dẫn cơ bản này không thay thế cho huấn luyện, sự cẩn trọng và kiến thức về kỹ thuật của người sử dụng. Do đó chúng tôi giả định rằng người dùng đã được biết tuân thủ các luật lệ pháp lý, các tiêu chuẩn và các khuyến cáo.

HÃY ĐỌC CÁC HƯỚNG DẪN THẬT CẨN THẬN TRƯỚC KHI CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM LẦN ĐẦU TIÊN!

3. **Nhãn mác**

- Mã số hàng hay số đơn hàng
- Mã số lô

4. **Mục đích sử dụng**

Là sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ phẫu thuật viên trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo

5. **Hướng dẫn sử dụng**

- Phải sử dụng đúng loại dụng cụ cho từng mục đích sử dụng
- Không áp dụng các chất có tính bám dính lên trên dụng cụ vì sẽ làm hỏng bề mặt sản phẩm và có thể làm phai màu, gỉ hoặc mòn
- Không được chạm vào đầu dụng cụ. Người sử dụng dụng cụ phải là người có kiến thức và được đào tạo về cách sử dụng dụng cụ phẫu thuật
- Khi sắp xếp dụng cụ, phải luôn đặt các dụng cụ nặng hơn bên dưới và dụng cụ nhẹ hơn bên trên và đặt dụng cụ trên một miếng vải hoặc khăn
- Không sử dụng dầu để bôi trơn dụng cụ; chỉ sử dụng các chất bôi trơn có thể hoà tan trong nước
- Không ngâm dụng cụ quá lâu hơn mức cần thiết trong dung dịch tiệt trùng. Sau khi tiệt trùng, nên rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ tất cả các vết tích của hóa chất để ngăn dụng cụ bị phai màu hoặc mòn
- Phải bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo
- Phải luôn tiệt trùng dụng cụ trước mỗi lần sử dụng
- Phải bôi trơn dụng cụ sau khi làm sạch bằng chất bôi trơn dụng cụ có thể hòa tan trong nước
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Nên sử dụng dung dịch khử trùng với độ pH bằng 7
- Không sử dụng các chất vệ sinh có tính bám dính và bàn chải có lông cứng khi làm sạch dụng cụ
- Chỉ sử dụng nước cất để rửa sạch dụng cụ. Nước có chứa clo có thể làm hỏng hoặc phá hủy dụng cụ
- Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng để phòng dụng cụ bị hỏng
- Phải chú ý đặc biệt đến các dụng cụ vi phẫu vì các đầu dụng cụ có thể dễ dàng bị hỏng khi tiếp xúc với các dụng cụ khác
- Đảm bảo tất cả dụng cụ phải khô hoàn toàn trước khi bảo quản
- Phải kiểm tra thành phần cứng của nước được sử dụng trong nồi hấp tiệt trùng
- Dụng cụ nên được tiệt trùng bằng phương pháp tiệt trùng nhiệt ẩm ở 1320C trong 15 phút trước khi sử dụng để phẫu thuật. Nhiệt độ tiệt trùng không được vượt quá 1370C