



## Nexcare™ Reusable Cold Pack

### Mô tả sản phẩm

Nexcare™ Reusable Cold Pack được sử dụng cho nhiều mục đích, có thể tái sử dụng. Sản phẩm được cung cấp cùng vải bọc bảo vệ bên ngoài.

### Mục đích sử dụng

Nexcare™ Reusable Cold Pack được sử dụng để chườm lạnh giúp giảm đau, giảm sưng do bong gân, căng cơ, đau cơ, côn trùng cắn, va đập, bầm tím, bỏng nhẹ và nhức đầu do căng thẳng.

### Chống chỉ định

Chưa được biết

### Cách dùng

Chườm lạnh được khuyến cáo sử dụng trong 48 giờ đầu sau chấn thương.

1. Đặt túi chườm trong tủ đông ít nhất hai giờ trước khi sử dụng
2. Dùng vải bọc bên ngoài túi chườm
3. Đặt túi vào nơi cần chườm. Lấy túi chườm ra nếu thấy không thoải mái. Không chườm quá 20 phút/lần.

### Cảnh báo và thận trọng

- Nếu cá nhân có vấn đề về cảm nhận lạnh nên thận trọng khi sử dụng sản phẩm.
- Để tránh bị tê cóng, chườm lạnh không nên quá 20 phút/lần.
- Kiểm tra sản phẩm có rò rỉ không trước khi sử dụng. Vứt bỏ sản phẩm nếu bị rò rỉ.
- Chỉ sử dụng ngoài da. Cần có sự giám sát của người lớn khi sử dụng cho trẻ em.
- Dùng vải bọc bên ngoài khi sử dụng để cách nhiệt.
- Hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có thắc mắc về chấn thương hoặc sưng, đau kéo dài.
- Không sử dụng túi chườm lạnh để chườm nóng.

### Hạn sử dụng

Hạn sử dụng: 3 năm từ ngày sản xuất