



Hướng dẫn sử dụng

Túi đựng dịch xả 15L

Sản phẩm này được sử dụng kết nối với bộ cassette lọc màng bụng (hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc) tự động của Baxter.

Chỉ định dùng

Túi này được dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng (hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc) tự động (viết tắt là APD).

Được tiệt trùng bằng ethylene oxide.

Cất giữ ở nhiệt độ phòng.

Những cảnh báo

Không sử dụng nếu tình trạng đóng gói không toàn vẹn hoặc nếu nắp đậy phần đầu không ở đúng vị trí.

Không sử dụng lại.

Sử dụng lại hay xử lý lại thiết bị sử dụng 1 lần có thể dẫn đến tình trạng nhiễm bẩn và làm giảm chức năng của thiết bị hay tính toàn vẹn của cấu trúc.

Nếu không thể thực hiện được quá trình dẫn lưu, hãy liên lạc với bác sĩ của bạn.

Nhiều sản phẩm lọc màng bụng hiện có của những nhà sản xuất khác được sử dụng với các dụng cụ hay thiết bị dùng 1 lần của Baxter Healthcare Corporation. Baxter không kiểm soát sự thay đổi, dung sai, cường độ cơ học hoặc những thay đổi của sản phẩm theo thời gian sử dụng. Do đó, Baxter không thể đảm bảo rằng các sản phẩm dùng trong lọc màng bụng của những nhà sản xuất khác, khi được kết nối với những sản phẩm của chúng tôi sẽ cho kết quả như ý.

Thận trọng: Luật liên bang (Mỹ) quy định sản phẩm này chỉ được bán bởi bác sĩ hoặc theo đơn của bác sĩ.

Thận trọng: Cần phải kiểm tra tất cả những chỗ kết nối phải khít vừa vặn trước khi khởi đầu dòng chảy.

Các hướng dẫn sử dụng: Sử dụng kỹ thuật vô trùng

1. Tuân theo kỹ thuật vô trùng theo các hướng dẫn và huấn luyện thực hành lâm sàng
2. Xé vỏ túi dịch xả
3. Đảm bảo rằng kẹp đã được đóng trên ống ngắn có vòng kéo để tránh rò rỉ
4. Tháo vòng kéo từ đường dẫn lưu của bộ cassette trong máy thay dịch tự động.
5. Tháo nắp đậy phần đầu ra khỏi vòi của túi xả.
6. Luồn vòi của túi xả vào trong cổng của đường dẫn lưu bằng cách vừa xoắn vừa đè chúng vào nhau cho đến khi chúng vừa khít chặt.
7. Tham khảo hướng dẫn vận hành để bắt đầu quá trình lọc màng bụng tự động.
8. Sau khi hoàn tất điều trị, kẹp đường dây nối với túi dẫn lưu và tháo túi ra khỏi đường dây dẫn lưu của máy. Thực hiện theo các hướng dẫn của địa phương về việc loại bỏ các chất thải của quá trình lọc màng bụng tự động.

Baxter là thương hiệu đã được đăng ký của Baxter International Inc.

Được sản xuất bởi

Baxter Healthcare Corporation

Địa chỉ: 1900 North Highway 201, Mountain Home, AR, USA 72653 Mỹ.