



## Nexcare™ No Hurt Wrap

### Mô tả sản phẩm

Nexcare™ No Hurt Wrap là băng thun co giãn được cấu tạo từ vật liệu không dệt và sợi đàn hồi. Sản phẩm được đóng gói riêng ở dạng cuộn, bao gồm 2 loại là băng vô trùng và băng không vô trùng.

Băng tự dính mà không cần chất kết dính, kẹp hoặc băng khác. Tính năng dính của sản phẩm cung cấp lực cố định và ngăn không cho băng bị trượt, giãn hoặc lỏng, do đó không cần thiết phải điều chỉnh lại thường xuyên. Cấu trúc xếp giúp băng phù hợp và thoải mái, cho phép không khí tiếp cận với da. Ngoài ra, sản phẩm ít cồng kềnh và thoáng khí hơn so với các loại vải thun thông thường với lớp thun tự dính Coban™ mỏng và nhẹ.

### Mục đích sử dụng

Nexcare™ No Hurt Wrap được sử dụng như một loại băng thun để tạo lực nén, hỗ trợ hoặc bảo vệ băng hoặc thiết bị. Sản phẩm này không được thiết kế, bán hoặc dự định sử dụng trừ khi được chỉ định


### Chống chỉ định

Chưa được biết

### Cách dùng

#### • Hướng dẫn sử dụng chung

1. Lấy từ 12 inch đến 18 inch chiều dài băng Nexcare™ No Hurt Wrap từ cuộn để giảm căng trước khi quấn băng
2. Quấn chiều dài này nhẹ nhàng mà không kéo dài. Xếp chồng lên nhau từ ¼ đến ½ chiều dài băng mỗi lượt. Luôn tháo thêm phần băng Nexcare™ No Hurt Wrap trước khi thực hiện một lượt quấn để sản phẩm không bị quấn quá căng.
3. Lặp lại các bước trên cho đến khi hoàn thành quấn băng. Nếu cảm thấy khó chịu hoặc quá chặt, tháo ra và quấn lại. Cần thận trọng thêm là băng Nexcare™ No Hurt Wrap phải được tháo và thay sau mỗi 24 giờ.
4. Sau khi hoàn tất quấn băng, xé Nexcare™ No Hurt Wrap bằng tay. Cố định băng bằng cách nhấn vài inch ở phần cuối băng lên chính nó.

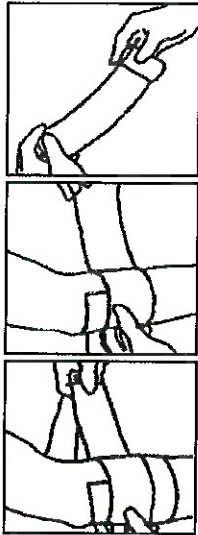

#### • Hướng dẫn sử dụng để bảo vệ băng vết thương

Sử dụng băng Nexcare™ No Hurt Wrap 3" (inch)

Sử dụng băng vết thương theo hướng dẫn.

Lấy ít nhất 12 inch chiều dài băng Nexcare™ No Hurt Wrap từ cuộn để giảm căng trước khi quấn băng Không kéo dài, đặt lên phần băng vết thương trước đó, ở phía xa nhất từ cơ thể.

Tiếp tục quấn, hướng về phía cơ thể, cho đến khi toàn bộ băng vết thương được phủ.

Cố định băng bằng cách nhấn vài inch ở phần cuối băng lên chính nó. Cần thận trọng thêm là băng Nexcare™ No Hurt Wrap phải được tháo và thay sau mỗi 24 giờ.

Không để băng Nexcare™ No Hurt Wrap tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở vì có thể dẫn đến nhiễm trùng.

#### • Hướng dẫn sử dụng để băng hỗ trợ mắt cá chân

Sử dụng băng Nexcare™ No Hurt Wrap 2" hoặc 3" (inch)



Lấy ít nhất 12 inch chiều dài băng Nexcare™ No Hurt Wrap để giảm căng trước khi quấn băng Không kéo dài, quấn một hoặc hai vòng quanh chân dưới, phía trên mắt cá chân, kết thúc ở phía trên gót chân.

Quấn ngang qua mắt cá chân và về phía bên trong bàn chân, ngay phía trên ngón chân.

Quấn hai hoặc ba vòng, hướng về phía mắt cá chân. Luôn phiên quấn xoắn ốc hướng lên trên hình xoắn ốc quanh phần trên của gót chân, dưới bàn chân, quanh gót chân và một lần nữa dưới bàn chân.

Kết thúc bằng một hoặc hai vòng quấn quanh chân phía dưới.

Cố định băng bằng cách nhấn vài inch ở phần cuối băng lên chính nó. Cần thận trọng thêm là băng Nexcare™ No Hurt Wrap phải được tháo và thay sau mỗi 24 giờ.

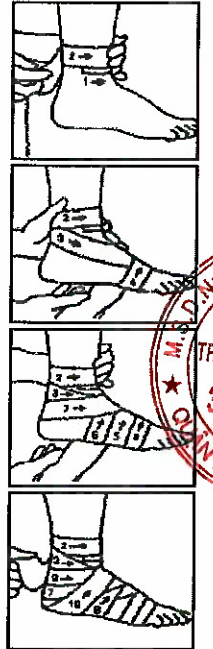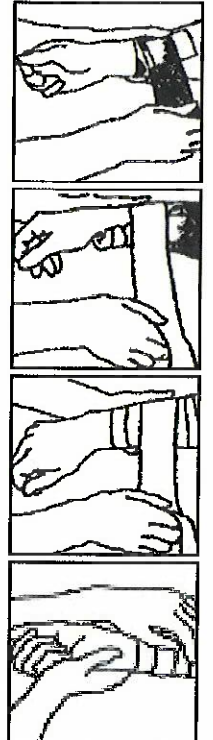



### • Hướng dẫn sử dụng để băng lòng bàn tay

Sử dụng băng Nexcare™ No Hurt Wrap 2" hoặc 3" (inch)

Sử dụng băng vết thương vào lòng bàn tay theo hướng dẫn.


Sử dụng Nexcare™ No Hurt Wrap, lấy khoảng 6" và gấp lại một nửa. Cắt hai rãnh cách đều nhau trên nếp gấp, tạo ra hai lỗ hình kim cương.

Mở ra và đặt các lỗ trên ngón tay giữa của bàn tay, giữ cuộn ở lòng bàn tay.

Không duỗi tay, đầu tiên quấn quanh lòng bàn tay, sau đó qua cổ tay và qua mu bàn tay.

Quấn vòng thứ hai quanh lòng bàn tay trước khi xé băng tay bằng Nexcare™ No Hurt Wrap từ cuộn.

Cố định băng bằng cách nhấn vài inch ở phần cuối băng lên chính nó. Cần thận trọng thêm là băng Nexcare™ No Hurt Wrap phải được tháo và thay sau mỗi 24 giờ.

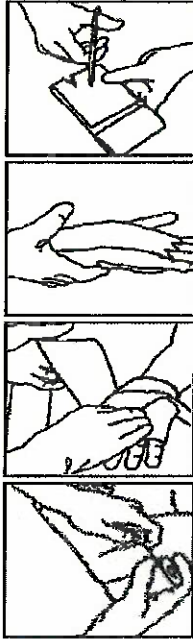

### • Hướng dẫn sử dụng để cố định ngón tay


Sử dụng băng Nexcare™ No Hurt Wrap 1" (inch)

Sau khi sử dụng băng, nếu cần, đặt nẹp dưới ngón tay. Lấy khoảng 6 inch băng Nexcare™ No Hurt Wrap từ cuộn để giảm căng trước khi quấn.

Không kéo dài, quấn một vòng quanh đầu ngón tay và ấn nhẹ vào vùng bị chổng lên nhau để giữ đúng vị trí.

Tiếp tục quấn tròn quanh ngón tay, từ đầu đến cuối.

Cố định băng bằng cách nhấn vài inch ở phần cuối băng lên chính nó. Cần thận trọng thêm là băng Nexcare™ No Hurt Wrap phải được tháo và thay sau mỗi 24 giờ.

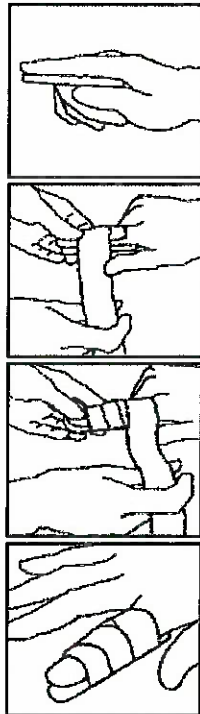

### Cảnh báo và thận trọng

1. Không quấn quá chặt để tránh làm kém lưu thông và gây tổn thương nghiêm trọng. Nguy cơ kém lưu thông cao hơn đối với trẻ em. Băng được thiết kế để không bị trượt hoặc lỏng sau khi sử dụng
2. Băng phải được tháo và thay mỗi 24 giờ. Nếu có dấu hiệu sưng, đổi màu, đau, tê, ngứa hoặc có thay đổi về cảm giác khác, tháo băng ngay lập tức và liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
3. Không đặt băng tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở vì có thể dẫn đến nhiễm trùng. Không tái sử dụng băng.

### Hạn sử dụng

Hạn sử dụng: 3 năm từ ngày sản xuất.

