




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SOI THANH QUẢN BẰNG VIDEO MODEL CLEARVUE

I. Lắp ráp và sử dụng:

1. Màn hình hiển thị
2. Nút nguồn khởi động thiết bị
3. Tay cầm kèm pin bên trong
4. Lưỡi đặt Nội khí quản

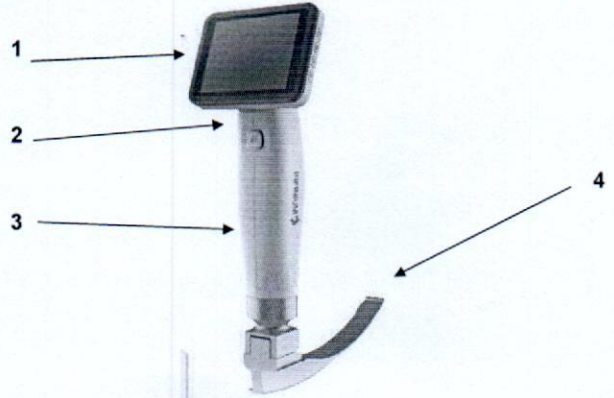

II. Quy trình sử dụng

1. Kết nối nguồn pin
2. Gắn ống đặt nội khí quản đúng kích cỡ bệnh nhân
3. Khởi động thiết bị
4. Tiến hành đặt ống nội khí quản trên bệnh nhân
5. Theo dõi quá trình đặt và tình trạng bệnh nhân trên màn hình hiển thị
6. Quan sát các cảnh báo của máy và kịp thời có mặt xử lý báo động

III. Quy trình bảo dưỡng

1. Tắt thiết bị
2. Vệ sinh máy
3. Ghi chú: PIN phải được sạc đầy và nếu không sử dụng thì trung bình khoảng 3 tuần sạc 1 lần (theo khuyến cáo của hãng).

**Hotline Kỹ Thuật DMED
0903882290**