

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU NGOẠI KIỂM HbA1C

1. Tên sinh phẩm

Mẫu ngoại kiểm sử dụng cho xét nghiệm định lượng HbA1C.

2. Thông tin cơ sở sản xuất

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Y học – Bộ Y tế tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần

Máu toàn phần.

Dung dịch bảo quản Alsever's 10%.

4. Quy cách đóng gói

Bộ mẫu ngoại kiểm gồm 1 mẫu, thể tích mỗi mẫu 1 mL.

5. Hạn sử dụng:

Xem thông tin trên hộp.

6. Bảo quản

Nhiệt độ từ 2 – 8°C.

7. Chỉ định sử dụng

Mẫu ngoại kiểm HbA1C chỉ được sử dụng trong ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1C.

8. Hướng dẫn chung

Mẫu chỉ được sử dụng trong ngoại kiểm.

Mẫu sau khi sử dụng phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 – 8°C.

Đọc kỹ "*Hướng dẫn sử dụng mẫu ngoại kiểm HbA1C*" trước khi dùng.

9. Cách sử dụng

Bước 1: Lấy sinh phẩm ra khỏi tủ lạnh để ở nhiệt độ phòng 10 – 15 phút trước khi sử dụng.

Bước 2: Lắc nhẹ, đều trước khi dùng.

Bước 3: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm đã đăng ký tham gia ngoại kiểm theo quy trình kỹ thuật của PXN.

Bước 4: Nhập kết quả qua tài khoản của PXN trên trang thông tin qccump.com.

Bước 5: In kết quả lưu hồ sơ tại PXN.

Ghi chú:

(i) Chương trình tuân thủ theo tiêu chuẩn **ISO17043** về chính sách chất lượng, chính sách bảo mật và dịch vụ khách hàng.

(ii) Mẫu đã được sàng lọc **Âm tính** với HIV, Viêm gan B&C. Cần tuân thủ các quy tắc an toàn sinh học khi thực hiện & lưu trữ tại phòng xét nghiệm.