


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN MỒ ĐỀ

Model: AD-960; AD-980

Tính năng

1. Có thể nâng cao, hạ thấp chiều cao bàn, phần lưng, phần chỗ ngồi, tính năng khóa là mô tơ điện – thủy lực.
2. Tất cả các chuyển động được kích hoạt bởi bàn đạp chân.
3. Cấu trúc chính được bao phủ bởi thép không gỉ. Vật liệu này chống vi khuẩn và chống bụi bẩn
4. Phần đệm và phần mở rộng dễ dàng di chuyển cho việc vệ sinh.
5. Tính năng dốc xuôi/ ngược có tích hợp
6. Phụ kiện cũng được làm từ thép không gỉ
7. Được trang bị tấm mở rộng ở dưới phần chân.

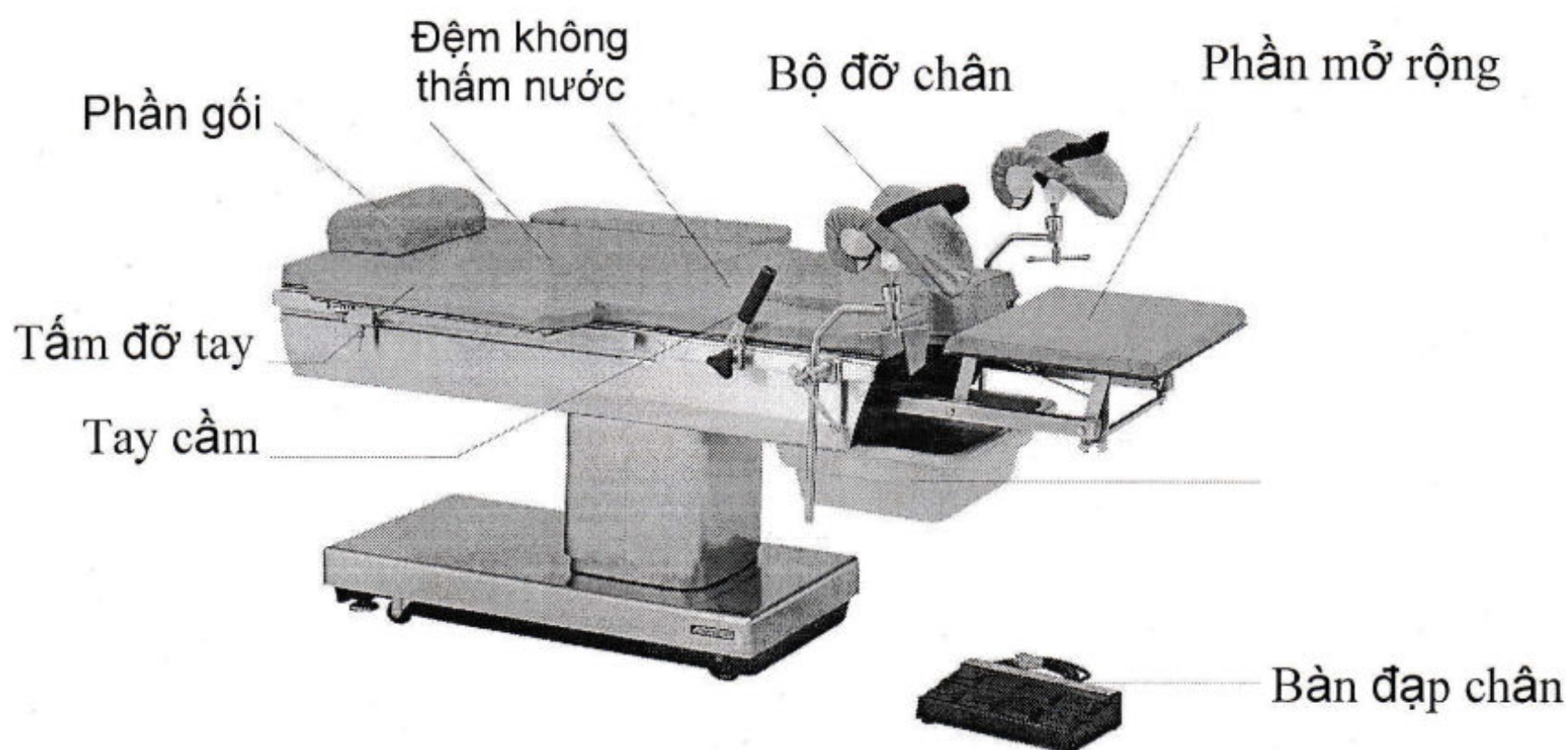

Cách sử dụng:

1. Cố định bàn để bằng cách khóa sàn.
2. Kết nối bàn đạp chân vào bảng điều khiển trên bàn và kết nối nguồn điện
3. Sau đó đạp chân vào bàn đạp để điều khiển các tính năng của bàn

| BRAKE | UP | BACK | UP | SEAT | UP | ELEV. | UP |
|-------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | DOWN | | DOWN | | DOWN | | DOWN |
| 7 | | 5 | | 3 | | 1 | |
| 8 | | 6 | | 4 | | 2 | |

Bàn đạp chân

4. Kết nối phụ kiện (nếu cần thiết).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Đức