



## CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN

Số 2 đường 1F, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Điện thoại: (028) 54336336 Fax: (028) 54318835


Email: sales@ducnguyen-medical.com

Website: www.ducnguyen-medical.com

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN ĐẠP CHÂN ĐƠN CỰC/ BÀN ĐẠP CHÂN LƯỠNG CỰC DÙNG CHO MÁY CẮT ĐÓT

### I. Các chức năng và cách sử dụng:

Cần nắm rõ các chức năng để vận hành thiết bị an toàn, hiệu quả

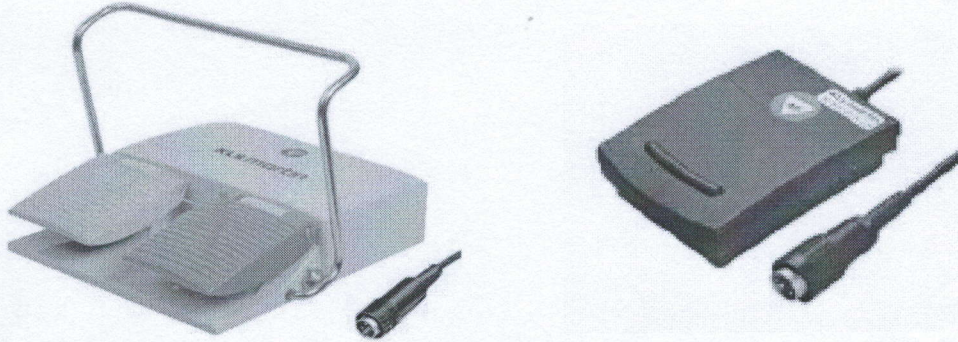

1. Kết nối bàn đạp chân đơn cực đến máy cắt đốt chuẩn Martin
2. Đối với loại 2 bàn đạp, bàn đạp màu vàng kích hoạt chế độ cắt, bàn đạp xanh kích hoạt chế độ đốt

### III. Quy trình bảo dưỡng

1. Ngắt kết nối với bệnh nhân và nguồn điện
2. Tháo các phụ kiện ra khỏi máy
3. Vệ sinh phụ kiện
4. Lắp phụ kiện mới cho máy để chuẩn bị thông khí cho bệnh nhân mới

**Hotline Kỹ Thuật Đức Nguyễn**  
**0917 882 449**