

Tp HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên hàng: GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG

Ký hiệu: PIONEER 4.2 CARE

Hãng sản xuất: MEYSA TIBBI CIHAZLAR SAN VE TIC A.S. (MEISSA)

Nước sản xuất: THỔ NHĨ KỲ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: <ul style="list-style-type: none">- Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh cao thấp, vị trí tư thế đầu thấp hơn chân và tư thế chân thấp hơn đầu, điều khiển bằng điện.- Có chức năng điều chỉnh gối và lưng đồng thời cùng lúc- Hoạt động được điều khiển bằng bảng điều khiển bệnh nhân và bảng điều khiển y tá.- Có chức năng nâng chân và lưng cùng lúc hoặc nâng từng phần.- Có pin dự phòng đề phòng khi mất điện- Chiều cao thấp nhất của giường: 34 cm- Giường phải có chức năng hỗ trợ ép tim ngoài lồng ngực bằng tay và điện sử dụng để cấp cứu nhanh khi bệnh nhân ngừng tim hoặc ngừng thở.- Hệ thống bánh xe: có thể khóa đồng thời 4 bánh xe tại 1 trong 2 bánh cuối giường.- Có ≥ 3 vị trí điều khiển : di chuyển tự do, di chuyển thẳng, khóa 4 bánh- 1 trong 4 bánh xe là bánh xe chống tĩnh điện cho giường- Có chức năng gập thông minh biến giường thành xe lăn và gập ở tư thế có lợi nhất cho hô hấp và tuần hoàn máu, có thanh treo nước thải 2 bên giường.- Có móc cố định bệnh nhân 2 bên giường- Có chỗ móc treo nước thải ở giữa 2 bên giường.- Thanh chắn 2 bên giường mỗi bên gồm 2 phần có thể nâng hạ bao phủ toàn bộ chiều dài giường- Khoảng cách giữa thanh chắn khi nâng lên với tấm chắn chân giường và đầu giường.- Tấm nâng lưng khi nâng có cơ chế nâng cao và dịch lùi phù hợp với cơ thể- Bộ điều khiển cầm tay có chức năng: có chức năng nâng hạ lưng, nâng hạ gối, nâng hạ cao thấp, nâng hạ lưng và gối đồng thời.- Bộ điều khiển cho điều dưỡng: có chức năng nâng hạ lưng, nâng hạ gối, nâng hạ cao thấp toàn giường, vị trí tư thế đầu thấp hơn chân và tư thế chân thấp hơn đầu, nâng hạ lưng và gối đồng thời bằng 1 nút bấm, đưa giường về tư thế chân thấp hơn đầu bằng 1 nút bấm. Có chức năng khóa điều khiển dành cho bệnh nhân.- Có đèn báo tình trạng pin (đầy, đang sạc, cần sạc)- Hệ thống điện tử tiêu chuẩn IPX4- Có 4 con lăn chống va đập và trượt qua vật cản tại 4 góc giường- Góc nâng cẳng chân có thể điều chỉnh 2 mức.- Có chức năng chống kẹt gầm giường bằng cách tự động tạm dừng khi hạ độ cao toàn giường.- Khung chính và mặt giường bằng thép, sơn tĩnh điện.- Hai tấm đầu và chân giường bằng PE hoặc chất liệu tốt hơn



