

STT	Mã ICC	Tên sản phẩm
#12	25510	Stomahesive Protective Powder

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Đọc hướng dẫn sử dụng khi dùng.


Để kiểm soát phân tử hậu môn nhân tạo.

THẬN TRỌNG

Chỉ dùng ngoài. Tránh để tiếp xúc với mắt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Làm sạch vùng da quanh hậu môn nhân tạo.
2. Cho một lượng bột nhỏ lên da, phủi bỏ bột thừa.
3. Dán đế, túi.
4. Bột còn có thể dùng làm đầy khoảng giữa đế dán và hậu môn nhân tạo.

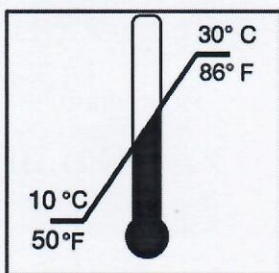

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nhiệt độ bảo quản

Giữ nơi khô ráo.

Tránh ẩm.



LOT

Số lô sản xuất



Ngày hết hạn sử dụng

Lưu ý: Khi có dấu hiệu kích ứng, ngưng sử dụng sản phẩm và tham vấn ý kiến của nhân viên y tế.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng xem tại: www.ConvaTec.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Rửa sạch vùng da quanh hậu môn nhiều lần.
2. Cho một lượng bột nhỏ lên da, phủ lớp bột mịn.
3. Dùng cố, khô.
4. Bột nên có thể dùng làm đầy khoảng giữa đế giày và hậu môn chân bạn.



ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Nhiệt độ bảo quản

Chữ hơi khô ráo.

Tránh ẩm.

