

Smart Card for HumaSRate 24^{PT} (1200 tests) – Mã số 15024/12

Thẻ thông minh lưu số lượng xét nghiệm cho máy xét nghiệm tốc độ lắng máu HumaSRate 24^{PT}

Chủ sở hữu hợp pháp: HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH

Max-Planck-Ring 21, 65205 Wiesbaden, Germany

Mục đích sử dụng

Thẻ thông minh **Smart Card** được sử dụng để lưu số lượng xét nghiệm cho máy xét nghiệm tốc độ lắng máu HumaSRate 24^{PT}.

Mỗi thẻ có thể lưu được 1200 test.

Hướng dẫn sử dụng

- Kết nối dây nguồn và gắn thẻ thông minh Smart Card vào máy HumaSRate 24PT. Bật công tắc nguồn chính ở mặt sau và công tắc ở mặt trước của thiết bị. Giao diện đăng nhập của thiết bị sẽ hiện lên.

- Nếu Smart Card được kết nối với thiết bị, số lượng test còn lại sẽ hiện lên trên dongle. Thẻ thông minh của máy HumaSRate 24PT chứa số lượng test nhất định. Mỗi lần thiết bị thực hiện một test, số lượng test trên thẻ thông minh sẽ tự động giảm 1. Khi số lượng test còn lại trên thẻ thông minh không đủ, thiết bị không thể thực hiện các xét nghiệm mẫu cho tới khi cho một dongle/thẻ thông minh với số lượng test còn đủ vào. Mỗi thẻ thông minh có chứa 1200 test Thiết bị sẽ tự động chạy một xét nghiệm kiểm tra trước khi phân tích để đảm bảo kết nối thiết bị, motor nâng và trộn, vị trí ban đầu và máy quét LED hồng ngoại hoạt động như mong đợi. Nếu những chức năng trên không bình thường hoặc hư hỏng, tin nhắn báo lỗi sẽ hiển thị trên màn hình phần mềm. Có hai chế độ cho thiết bị là BATCH và STAT, được giải thích trong hướng dẫn sử dụng máy.