

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
PROCTOCARE

THÀNH PHẦN:

Escin (Chiết xuất hạt dẻ ngựa), Chiết xuất Xuyên tâm liên, Chiết xuất Ngưu tinh thảo, Chiết xuất Hòe giác, Long não, Curcuma Phospholipid, Allatoin, Dầu hạnh nhân, Dầu hạt nho, Tinh dầu quế, Na₂EDTA, Acid citric, Kẽm Oxyd, Phenoxy Ethanol, Ethyl hexyl glyceryl, Nước tinh khiết và phụ liệu vừa đủ 25g.

MỤC ĐÍCH/CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

Hỗ trợ điều trị trĩ nội, trĩ ngoại, nứt kẽ hậu môn; Co búi trĩ.

Proctocare tạo thành lớp gel quanh ống hậu môn ngăn ngừa vi khuẩn gây viêm nhiễm, khó chịu vùng hậu môn; Giảm nhanh các triệu chứng kích thích khó chịu do trĩ gây ra: đau, căng tức, sưng, nóng rát, ngứa, kích ứng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Cách dùng:

- Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn, lau khô trước khi tra gel.
- Mở nắp tuýp, xé màng nhôm nắp và lắp đầu ống vào tuýp Gel. Sau đó bóp nhẹ tuýp để lấy ra 1 lượng gel vừa đủ, bôi lên vùng hậu môn. Ngày dùng 2-3 lần.

Vệ sinh sạch đầu ống sau mỗi lần sử dụng.

Đối tượng sử dụng:

Người bị trĩ nội, trĩ ngoại, nứt kẽ hậu môn, ngứa hậu môn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm

BẢO QUẢN:

Đề nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Toàn