

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Đèn mở di động 100.000 Lux)

I. Chuẩn bị trước khi sử dụng:

- 1). Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi thực hiện
- 2). Kiểm tra và xác nhận phích cắm được cắm vào ổ. (Đảm bảo nguồn điện là 220V)
- 3). Lắp tay cầm tiệt trùng bằng cách đẩy nó vào bộ điều khiển (Nghe thấy tiếng “tích” là lắp hoàn chỉnh)
- 4). Bật phím nguồn trên bộ điều khiển và bấm đèn thay đổi quan sát, chuyển nếu thấy nguồn điện của đèn B sáng.

II. Thao tác và cách sử dụng:

- 1). Nhấn phím “on” – bật trên công tắc nguồn của bộ điều khiển
- 2). Nhấn nút điều khiển nguồn sáng và điều chỉnh độ sáng của đèn
- 3). Dùng tay cầm tiệt trùng để điều chỉnh góc của trục để tập trung khi thao tác trên bệnh nhân
- 4). Dùng tay cầm điều khiển tập trung để điều chỉnh tiêu điểm

III. Một số lưu ý khi sử dụng:

- 1). Sản phẩm này sẽ được sử dụng bởi các bác sĩ, y tá hoặc người có trình độ chuyên môn.
- 2). Sản phẩm không được tháo rời trong bất kỳ trường hợp nào.
- 3). Nếu sản phẩm bị hỏng, vui lòng tắt nguồn điện ngay lập tức và đọc hướng dẫn để kiểm tra xem có thể sửa chữa hư hỏng không. Nếu phương pháp sửa chữa không được nêu trong hướng dẫn, xin vui lòng KHÔNG thực hiện bất kỳ hành động nào và liên hệ với nhà cung cấp.
- 4). Hãy tránh các vị trí sau để cài đặt:
 - * Vị trí có nhiệt độ dưới 0 hoặc trên 40⁰C
 - * Vị trí có áp suất không khí thấp hơn 700hPa hoặc cao hơn 1060hPa
 - * Vị trí tiếp xúc với khí độc
 - * Vị trí tiếp xúc với hơi nước



- * Vị trí tiếp xúc với cát và bụi tập trung cao
- * Vị trí có không khí có nồng độ mặn cao
- * Vị trí có điện áp không ổn định
- * Vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
- * Vị trí có thông gió thấp
- * Vị trí có thể tiếp xúc với độ ẩm cao

5). Khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng TẮT nguồn điện, ngăn nước hoặc bất kỳ chất lạ nào xâm nhập vào sản phẩm

6). Vui lòng không gây áp lực cao hoặc sốc mạnh cho sản phẩm

7). Vui lòng không lắp ráp hoặc đính kèm các thiết bị hoặc vật phẩm không phải là sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp cho sản phẩm. (Độ an toàn của sản phẩm không được đảm bảo khi các sản phẩm khác được gắn hoặc lắp ráp vào sản phẩm)

8). Để đảm bảo sử dụng an toàn, vui lòng đảm bảo điện áp khớp với điện áp nguồn của sản phẩm trước khi bật nguồn điện.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hương

