

Dung dịch xịt mũi

Sak Skin SEA

Safe for Baby
Làm sạch & Kháng khuẩn



Dung dịch xịt mũi

Sak Skin SEA

Safe for Baby
Làm sạch & Kháng khuẩn



Natri clorid.....0.9%
Benzalkonium clorid...0.01%
Water (RO).....99.09%

- Phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang
- Dùng cho:
 - + Trẻ trên 3 tháng tuổi
 - + Phụ nữ mang thai, người lớn

THÀNH PHẦN:

Natri clorid.....0.90%
Benzalkonium clorid.....0.01%
Water (RO).....99.09%

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

- Dung dịch xịt mũi dạng phun sương dùng được cho trẻ em trên 3 tháng tuổi, phụ nữ có thai và người lớn.
- Dung dịch xịt mũi có tác dụng kháng khuẩn, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang.
- Giúp làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
- Đầu hơi ngả về phía sau, đưa vòi xịt vào mỗi bên mũi, dùng tay ấn dứt khoát 2 đến 3 lần mỗi bên mũi.
- Sử dụng 3 đến 4 lần/ngày.
- Lau sạch, lau khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ sau khi sử dụng.



Dung dịch xịt mũi

Sak Skin SEA

Safe for Baby
Làm sạch & Kháng khuẩn



Natri clorid.....0.9%
Benzalkonium clorid...0.01%
Water (RO).....99.09%

- Phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang
- Dùng cho:
 - + Trẻ trên 3 tháng tuổi
 - + Phụ nữ mang thai, người lớn

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sakoskin SEA là trang thiết bị y tế Dung dịch dạng phun sương phân tán đều trên niêm mạc mũi giúp vệ sinh, làm sạch, kháng khuẩn, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, xa tầm tay trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Tiêu chuẩn: TCCS
Số TBYT:

Lô SX/Lot No:

Ngày SX/Mfg Date:

Hạn SD/Exp Date:

Sản xuất tại: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế **DOLEXP**AR
Địa chỉ: Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

70ml



70ml



Dung dịch xịt mũi

Sako Skin SEA

Safe for Baby
Làm sạch & Kháng khuẩn



70ml



Natri clorid.....0.9%
Benzalkonium clorid...0.01%
Water (RO).....99.09%

- 🚫 Phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang
- 🚫 Dùng cho:
 - + Trẻ trên 3 tháng tuổi
 - + Phụ nữ mang thai, người lớn

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sakoskin SEA là trang thiết bị y tế

Dung dịch dạng phun sương phân tán đều trên niêm mạc mũi giúp vệ sinh, làm sạch, kháng khuẩn, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.

THÀNH PHẦN:

Natri clorid 0.90%, Benzalkonium clorid 0.01%, Water (RO) 99.09%.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

- Dung dịch xịt mũi dạng phun sương dùng được cho trẻ em trên 3 tháng tuổi, phụ nữ có thai và người lớn.
- Dung dịch xịt mũi có tác dụng kháng khuẩn, giúp phòng ngừa viêm mũi, viêm xoang.
- Giúp làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, giúp mũi thông thoáng, dễ thở, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng.
- Đầu hơi ngả về phía sau, đưa vòi xịt vào mỗi bên mũi, dùng tay ấn dứt khoát 2 đến 3 lần mỗi bên mũi.
- Sử dụng 3 đến 4 lần/ngày.
- Lau sạch, lau khô vòi phun, đậy nắp bảo vệ sau khi sử dụng.

BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, xa tầm tay trẻ em.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Sản xuất tại: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế **DOLEXP HAR**

Địa chỉ: Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.