



# Sa Lady<sup>gel</sup>



Safe for lady



Green tea

Tea tree extract

Aloe vera extract

100ml



# Sa Lady<sup>gel</sup>

Safe for lady

## THÀNH PHẦN:

Nước tinh khiết, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Carbopol® Aqua SF-1, Polyethylene glycol, Sodium Cocoamphoacetate, Chiết xuất trà trà, Sodium laureth sulfate, Chiết xuất lô hội, Chiết xuất trà xanh, Chiết xuất trầu không, Phenoxyethanol, Acid Citric, Natri hydroxyd, hương Lavender vừa đủ 100ml.

## CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

Vệ sinh vùng kín, làm sạch, khử mùi hôi, dùng hàng ngày hoặc khi bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Sử dụng sản phẩm trong các trường hợp:

- Vệ sinh hàng ngày mang lại cảm giác khô thoáng dễ chịu.
- Vệ sinh vùng kín khi bị viêm nhiễm, nấm âm đạo, âm hộ.
- Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt, hậu sản.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Làm ướt vùng kín, lấy 2-3ml gel vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ vùng kín trong khoảng 30 giây, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

**Nên sử dụng hàng ngày.**



# Sa Lady<sup>gel</sup>



# Sa Lady<sup>gel</sup>



Safe for lady



Green tea

Tea tree extract

Aloe vera extract

100ml



# Sa Lady<sup>gel</sup>

Safe for lady

## MÔ TẢ SẢN PHẨM:

**SALADYgel** là trang thiết bị y tế có tác dụng: Làm sạch, khử mùi hôi, dùng hàng ngày hoặc khi bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

## BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, xa tầm tay trẻ em.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Đị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

## TIÊU CHUẨN: TCCS

## SỐ TBYT:

Lô SX/Lot No:

Ngày SX/Mfg Date:

Hạn SD/Exp Date:

mã vạch/mã QR

Sản xuất tại:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế **DOLEXPHAR**

Địa chỉ: Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.



**Sak Skin**

Gel vệ sinh phụ nữ

# Sa Lady gel



*Safe for lady*



*Green tea*

*Tea tree extract*

*Aloe vera extract*



NET WT: 100ML

## MÔ TẢ SẢN PHẨM:

**SALADYgel** là trang thiết bị y tế có tác dụng: Làm sạch, khử mùi hôi, dùng hàng ngày hoặc khi bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

## THÀNH PHẦN:

Nước tinh khiết, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Carbopol® Aqua SF-1, Polyethylene glycol, Sodium Cocoamphoacetate, Chiết xuất trà trà, Sodium laureth sulfate, Chiết xuất lô hội, Chiết xuất trà xanh, Chiết xuất trầu không, Phenoxyethanol, Acid Citric, Natri hydroxyd, hương Lavender vừa đủ 100ml.

## CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

Vệ sinh vùng kín, làm sạch, khử mùi hôi, dùng hàng ngày hoặc khi bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Sử dụng sản phẩm trong các trường hợp:

- Vệ sinh hàng ngày mang lại cảm giác khô thoáng dễ chịu.
- Vệ sinh vùng kín khi bị viêm nhiễm, nấm âm đạo, âm hộ.
- Vệ sinh trong chu kỳ kinh nguyệt, hậu sản.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Làm ướt vùng kín, lấy 2-3ml gel vào lòng bàn tay, thoa rửa nhẹ vùng kín trong khoảng 30 giây, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

**Nên sử dụng hàng ngày.**

## BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô mát, xa tầm tay trẻ em.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

## TIÊU CHUẨN: TCCS

## SỐ TBYT:

Sản xuất tại:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế **DOLEXP HAR**  
Địa chỉ: Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.