



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KCN MINH ĐỨC

Địa chỉ: Phòng 1601, Tầng 16, Tòa nhà Daeha Business Center

360 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Tel: 024.66.84.77.99; Email: sales@midtech.vn; web: <http://www.midtech.vn>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thiết bị che chắn tia X bảo vệ cơ thể (Bao gồm Quần áo, váy, tạp dề chì, găng tay chì, giáp cổ chì, mũ chì, kính chì đeo mắt, kính chì che chắn phòng X-Quang, màn chắn chì ...) là công cụ để bảo vệ từng cá nhân khi làm việc gần nguồn phóng xạ, hoặc trực tiếp nguồn phóng xạ. Giúp người thao tác phòng tránh được những tia phóng xạ trực tiếp, vô tình bắn vào cơ thể người ở mức độ thấp nhất. Vì vậy khi sử dụng Thiết bị che chắn tia X cần tuân thủ những chỉ dẫn sau:

Hướng dẫn chung:

Quần áo, váy, tạp dề chì có sẵn ở nhiều kích cỡ chuẩn và các kích cỡ có thể được sản xuất theo kích thước của bạn. Cần thận trọng để đảm bảo bạn mặc đúng kích cỡ và tất cả các khu vực, bộ phận quan trọng của cơ thể đều được che kín hoàn toàn.

Găng tay được sản xuất từ một khuôn mẫu. Không có đường nối hoặc nếp gấp hoặc rò rỉ bức xạ như găng tay khác. Găng tay làm giảm 100% chùm tia bức xạ trực tiếp ở 80 kVp và được đánh giá ở mức tối thiểu 0,50mm ở chùm trực tiếp 120 kVp. Găng tay có một kích thước và có chiều dài đủ để che chắn 15" được đo từ đầu ngón tay đến cổ tay.

Tất cả các tạp dề và găng tay bảo vệ bức xạ nên được kiểm tra và giám sát thường xuyên để đảm bảo tính toàn vẹn của chất nền. Lite Tech khuyến cáo tối thiểu hai lần kiểm tra hàng năm. Bất kỳ tạp dề hoặc găng tay bảo vệ nào nếu thấy có lỗ thủng, rách hoặc rò rỉ bức xạ phải được đưa ra khỏi dịch vụ ngay lập tức và được sửa chữa hoặc hủy bỏ.

Bảo quản, lưu trữ:

Tạp dề nên luôn được treo đúng cách trên giá hoặc móc áo được thiết kế đặc biệt để bảo quản tạp dề. Không bao giờ gấp, nhăn hoặc xếp một chiếc tạp dề. Tránh các vật nhọn. Vật liệu lõi của áo chì khá mỏng manh nên khi bị thủng lỗ, áo chì sẽ không sử dụng được nữa.

Găng tay, do tính chất của khuôn, có thể được lưu trữ theo hầu hết mọi cách mà không gây ra thiệt hại. Nên cẩn thận để tránh các vật sắc nhọn xuyên qua và qua các lỗ sẽ cho phép bức xạ truyền đến người mặc.

Vệ sinh, làm sạch:

Chỉ sử dụng nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ hoặc chất tẩy rửa tạp dề đặc biệt do chúng tôi cung cấp. Không bao giờ sử dụng hóa chất mạnh và các thiết bị máy móc thương mại để giặt và sấy khô áo chì.

Lớp lót găng tay có thể tháo ra và giặt bằng tay, sau đó treo lên cho đến khi khô.

Lớp lót găng tay có thể thay thế khi bị hỏng.

Khử trùng:

KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng nồi hấp hơi nước vì nhiệt sẽ gây hư hại nghiêm trọng cho bề mặt bảo vệ của áo chì và phụ kiện.

Tạp dề và găng tay có thể được khử trùng bằng khí ETO hoặc khử trùng bằng bình xịt Clorox Hydrogen Peroxide Spray hoặc khăn lau.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Vân Anh