



## CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM

44/8 Đường số 16, P.BHH, Q. Bình Tân, TP HCM

### MẪU NHÃN

#### MIẾNG DÁN HẠ SỐT NHA ĐAM

**Thành phần :** Gelatine, Tartaric acid, EDTA-2NA, eucalyptol, các thành phần khác gồm: Glycerine, carbomer, Menthol, Bạc hà , Sodium polyacrylate, nước tinh khiết, màu xanh.

**Chỉ định:** Giúp làm mát , hạ nhiệt nơi chườm khi nóng,sốt, nhiệt độ cơ thể tăng cao khi trời nắng, say nắng, đau răng, giảm đau cơ bắp . Giúp làm dịu vùng da bị cháy nắng.

**Hướng dẫn sử dụng:**Lau sạch và khô vùng da cần dán , gỡ miếng film ra khỏi miếng dán, dán mặt dính lên vùng da sạch và khô nơi muốn làm mát hoặc giảm đau như trán, bẹn, nách ,lưng,vai, cơ bắp. Có thể cắt nhỏ miếng dán theo kích thước cần dùng. Để tăng hiệu quả làm mát, cho nguyên gói vào ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng.Có thể dán nhiều miếng cùng một lúc, mỗi miếng dán chỉ được sử dụng một lần trong 10 giờ

Dùng được cho trẻ sơ sinh .Khi sử dụng sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phải có sự giám sát của người lớn .

**Chống chỉ định :** Không dán lên mắt , niêm mạc, vùng da bị tổn thương, vết thương hở ....

**Cảnh báo và thận trọng:**Ngưng sử dụng trong trường hợp bị dị ứng ứng với các thành phần của miếng dán

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra: Có thể gây dị ứng da với những làn da mẫn cảm

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.

**Sản phẩm không phải là thuốc , không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

**SỐ CÔNG BỐ :**

**Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Việt Đức**

**Địa chỉ : 68/116 Đồng Nai, P15, Quận 10, TP HCM**

**Số lô:**

**NSX:**

**HSD:**