

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kẹp rốn sơ sinh

Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO

Địa chỉ: Số 19 ngõ 232 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

- Phải sử dụng đúng loại dụng cụ cho từng mục đích sử dụng theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không áp dụng các chất có tính bám dính lên dụng cụ vì sẽ làm hỏng bề mặt sản phẩm và có thể làm phai màu, gỉ hoặc mòn.
- Không được chạm vào đầu dụng cụ.
- Sát trùng tay trước khi sử dụng
- Phải bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo.
- Dùng kẹp rốn kẹp sát chân rốn, bóp cho hai mẫu răng gắn vào nhau
- Cắt rốn 1 đoạn cách kẹp 3cm
- Sát trùng vết cắt băng lại
- Phải kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng để phòng dụng cụ bị hỏng.



GIÁM ĐỐC
Nhữ Đức Hoàng