

Hướng dẫn sử dụng Váy áo chì chắn tia X

❖ CHUNG LOẠI SẢN PHẨM:

1. BRSV120117/50LL.
2. SV120117/50LL
3. SVCARDI120117/50LL
4. MISV120117/50LL
5. MASV120117/50LL
6. WSV120117/50LL
7. WESV120117/50LL

✓ **Khuyến nghị sử dụng**

Người dùng phải chú ý rằng bản thân có đang sử dụng trang phục phù hợp với các rủi ro hay không. Người dùng phải chú ý khi đưa ra lựa chọn độ dày lớp chì của trang phục và lựa chọn loại bảo vệ mặt trước và sau.

Đảm bảo mặc trang phục đúng cách và chắc chắn.

Ghi nhớ sử dụng trang phục đúng mục đích và đặc biệt tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

✓ **Bảo quản và lưu trữ**

Tuổi thọ của trang phục chống tia X là từ 5 đến 10 năm tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và lưu trữ của chúng.

- Tránh tiếp xúc với trực tiếp nhiệt độ cao và độ ẩm cao
- Treo trang phục lên móc áo sau khi sử dụng. Không gấp hoặc quấn để tránh nếp nhăn vĩnh viễn
- Không treo trên móc nhọn hoặc đinh vì điều này sẽ làm biến dạng trang phục
- Nên gấp cẩn thận và đặt trong bao bì gốc hoặc loại bao bì tương đương khi vận chuyển

✓ **Làm sạch**

Lớp phủ đặc biệt của Medical Index radiation x-ray ngăn chặn bụi bẩn xâm nhập vào vật liệu.

Để tránh thiệt hại của lớp phủ, nên:

- Làm sạch thường xuyên bụi bẩn bằng bọt biển hoặc vải ướt với dung dịch xà phòng nhẹ và nước
- Làm sạch vết bẩn ướt bằng chất tẩy âm và vải mềm.
- Làm sạch vết bẩn khô bằng chất tẩy rửa âm, để chất tẩy hoạt động bề mặt trong khoảng 60 phút sau đó làm sạch bằng vải mềm.
- Đối với các vết bẩn cực kỳ dai dẳng, bạn nên sử dụng dung dịch natri thiosulfate 10%. Tuân thủ các hướng dẫn sử dụng sản phẩm khi sử dụng.
- Vui lòng không sử dụng các chất tẩy rửa ăn da như dung môi có cồn, xăng và không ngâm trang phục trong nước hoặc giữ dưới vòi nước

✓ **Khử trùng**

Không sử dụng bất kỳ chất khử trùng nào có cồn và không hấp khử trùng cho trang phục chống tia X

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



