



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

MERUFA JOINT STOCK COMPANY

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, T.p Hồ Chí Minh

Nhà máy: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM

Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28). 3765 4161

Website: www.merufa.com.vn

E-mail: merufa@merufa.vn

Tp.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEL SIÊU ÂM

Gel siêu âm thuộc dạng tan trong nước (water-base) được dùng phổ biến trong chẩn đoán siêu âm y khoa. Gel không có chất ăn mòn, không gây hồng đầu dò, không chứa chất bảo quản và dầu đặc biệt không gây dị ứng cho da.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Thoa gel lên vùng điều trị hoặc chẩn đoán với số lượng vừa đủ lên da. Gel siêu âm có tác dụng loại bỏ các bọt khí giữa đầu dò và cơ thể, giúp đầu dò tiếp xúc chắc chắn với cơ thể để sóng siêu âm truyền tốt hơn.
- Lau sạch bằng khăn hoặc giấy mềm sau khi sử dụng.

Chú ý:

Chỉ sử dụng bên ngoài. Không sử dụng với máy khử rung tim. Không sử dụng bên trong, trong thủ tục xâm lấn hoặc ứng dụng sinh thiết.

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cn. Lưu Tiến Cường