

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
HP NOSEA BABY**

**1. THÀNH PHẦN**

Sodium chloride (New Zealand), Benzalkonium chlorid, Nano Bạc, Khuynh diệp, Nước cất vừa đủ.

**2. CHỈ ĐỊNH/MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

- Hỗ trợ sát khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm triệu chứng như sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang và viêm mũi dị ứng do thay đổi thời tiết.
- Vệ sinh mũi hàng ngày: Làm sạch dịch nhầy, gỉ mũi, tạo cảm giác thông thoáng dễ thở.
- Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của mũi, phục hồi các niêm mạc suy yếu, loại bỏ vi khuẩn có thể lây nhiễm trong vùng tai mũi họng.

**3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG**

Trẻ em từ 3 tháng tuổi trở lên

**4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Đặt bé nằm xuống và nghiêng đầu bé sang một bên

Lắc nhẹ bình xịt, xịt thẳng dung dịch vào 2 bên mũi: 2-3 lần mỗi bên mũi, 3-6 lần/ ngày hoặc sử dụng nhiều hơn khi cần thiết.

**5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.


**6. BẢO QUẢN**

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.

**7. HẠN DÙNG**

36 tháng kể từ ngày sản xuất

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
*Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*

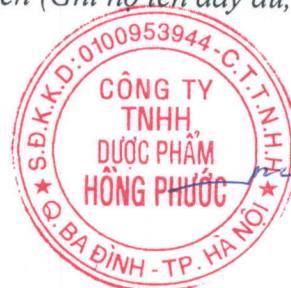

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Loan*