



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM
Lô B 5 KCN Tam Điệp – TP. Tam Điệp – T. Ninh Bình

Tel: 02293. 777 .588 Fax: 02293. 777. 589 – Http/www.mpv.vn – Email: info@mpv.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA BA NGÃ MPV

1. Kiểm tra tính nguyên vẹn của bao bì đóng gói, mở túi lấy sản phẩm và kiểm tra sơ bộ khóa 3 ngã, thực hiện xoay thử xem khóa có bị lỗi không.
2. Ngắt ngưng đường truyền bằng cách quay đầu mũi tên của chạc ba về phía đường muốn ngưng.
3. Kết nối khóa 3 ngã với hệ thống dây truyền dịch đã chuẩn bị sẵn và thực hiện đuổi khí.
4. Thực hiện tắt – mở khóa để truyền dịch hoặc tiêm thuốc theo quy định.
5. Kết thúc quá trình sử dụng tháo bỏ khóa 3 ngã và tiêu hủy đúng quy định.

Chú ý:

- Sản phẩm chỉ được sử dụng một lần.
- Không được sử dụng khi bao bì hở.
- Tiêu hủy sau khi sử dụng theo đúng quy định