



PHYSIOMER®

Nước biển tự nhiên 100% vô trùng dùng thông rửa hốc mũi

PHYSIOMER® Normal Jet (Gentle Jet) 135ml ref:GENTLE135.VIETLE

Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên

PHYSIOMER® Baby (Tia phun sương) 115ml ref:BABY115.VIETLE

Sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

PHYSIOMER® Strong Jet (Tia phun mạnh) 210ml ref:STRONG210.VIETLE

Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên

RCNOT12 Sử dụng chăm sóc sau khi phẫu thuật

Mũi bảo vệ hệ hô hấp bằng cách lọc không khí hít vào. Thời gian làm vệ sinh mũi mỗi ngày giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng (TMH) thông thường. Điều này đặc biệt đúng đối với cơ địa dễ viêm nhiễm và dị ứng một số tác nhân nguy hại như khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm ...

PHYSIOMER® là serum sinh lý gốc từ nước biển có chứa toàn bộ các hoạt chất và muối khoáng sinh học tự nhiên có sẵn trong nước biển

Thành phần cấu tạo

Serum biển PHYSIOMER® là 100% nước biển tự nhiên đã qua hệ thống siêu lọc và khử bớt muối
-Có các nguyên tố vi lượng và độ muối gần giống với huyết tương giúp cho sự tái tạo tế bào
-Đáng trọng pH phù hợp với cơ chế sinh lý của hốc mũi
-Vô trùng và không chứa chất bảo quản

Đặc tính


-Rửa sạch và làm thông thoáng hốc mũi
-Làm sạch dịch nhầy đóng nghẹt trong mũi
-Làm dịu chứng sung huyết và giúp tái lập việc thở bằng mũi
-Giúp cho sự tái tạo của tế bào

Khi nào sử dụng PHYSIOMER®

-Vệ sinh mũi trong trường hợp cúm, viêm mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang mũi, viêm xoang, viêm mũi họng... Xịt vào trong hai hốc mũi 2 đến 4 lần mỗi ngày, nhiều hơn nếu cần thiết
-Vệ sinh mũi thường xuyên
-Xịt vào trong hai hốc mũi mỗi lần mỗi ngày

Cách sử dụng PHYSIOMER® Normal Jet và Strong Jet

- Mở nắp đậy và gắn đầu phun tia vào chai
- Nghe tiếng đầu sang một bên, ngậm miệng lại
- Xịt Physiomer vào lỗ mũi phía bên trên trong vòng vài giây cho đến khi nước chảy xuống lỗ mũi bên dưới
- Hít mũi
- Lặp lại thao tác này cho lỗ mũi bên kia

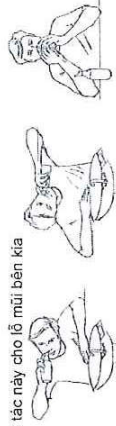

Cách sử dụng PHYSIOMER® Baby

- Mở nắp đậy và gắn đầu phun tia vào chai
- Nghe tiếng đầu bé sang một bên
- Xịt Physiomer vào lỗ mũi phía bên trên trong vòng vài giây cho đến khi nước chảy xuống lỗ mũi bên dưới
- Đỡ bé dậy, giúp bé ho và chùi mũi cho bé
- Lặp lại thao tác này cho lỗ mũi bên kia



Bảo quản

- Rửa với phun bằng nước ấm và lau khô đầu phun tia sau mỗi lần sử dụng
- Không để lạnh, nhiệt độ không quá 35°C
- Không được sử dụng sau thời hạn ghi trên vỏ hộp

Khuyến cáo

Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu các triệu chứng mũi kéo dài trên 5 ngày đối với trẻ sơ sinh và 10 ngày đối với người lớn và trẻ em. Trong trường hợp mũi bị kích ứng, tình trạng ngứa tạm thời có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em và không sử dụng khi chai không còn nguyên vẹn.

PHYSIOMER® là một chế phẩm y tế CE 0459 phù hợp tiêu chuẩn Quy định 93/42 của Cộng Đồng Châu Âu.

Nhà sản xuất
Laboratoire de la Mer Sas
F-35400 SAINT-MALO / FRANCE
<http://www.physiomer.com>

STERILE A

Rev 4.0[07.05.2018]

TNI - Lab. de la Mer - RCNOT12 - 150 x 210 mm à plat - 150 x 26,5 mm plié
50 g - Bleu 294 Recto - le 29/05/2018



PHYSIOMER®

Decongestant

ref: DECONGESTANT135.VIET.LE
RCNOT09

Nước biển tự nhiên 100% vô trùng dùng thông rửa hốc mũi

PHYSIOMER® Decongestant 135ml
Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên

Mũi bảo vệ hệ hô hấp bằng cách lọc không khí hít vào. Thói quen làm vệ sinh mũi mỗi ngày giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng (TMH) thông thường. Điều này đặc biệt đúng đối với cơ địa dễ viêm nhiễm và dị ứng một số tác nhân nguy hại như khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm ...

PHYSIOMER® là serum sinh lý gốc từ nước biển có chứa toàn bộ các hoạt chất và muối khoáng sinh học tự nhiên có sẵn trong nước biển

Thành phần cấu tạo
Serum biển PHYSIOMER® Decongestant là 100% nước biển tự nhiên đã qua hệ thống siêu lọc và khử bột muối
-Nồng độ muối cô đặc 2,2%
-Vô trùng và không chứa chất bảo quản
-Giúp cho hô hấp tốt hơn trong các trường hợp bị cảm lạnh, viêm xoang, viêm mũi dị ứng

Đặc tính
-Thông mũi và làm sạch mũi
-Làm giảm viêm niêm mạc mũi
-Làm sạch các chất bài tiết lấy nhiễm và các chất gây dị ứng
-Làm giảm việc sử dụng thuốc uống

Cách sử dụng PHYSIOMER® Decongestant
-Mở nắp đậy và gắn đầu phun tia vào chai
-Nghiêng đầu sang một bên, ngậm miệng lại
-Xịt Physiomer vào lỗ mũi phía bên trên trong vòng vài giây cho đến khi nước chảy xuống lỗ mũi bên dưới
-Hỉ mũi
-Lặp lại thao tác này cho lỗ mũi bên kia
-Vệ sinh 2-3 lần một ngày



Bảo quản
-Rửa với phun bằng nước ấm và lau khô đầu phun tia sau mỗi lần sử dụng
-Không để lạnh, nhiệt độ không quá 35°C
-Không được sử dụng sau thời hạn ghi trên vỏ hộp

Khuyến cáo
Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu các triệu chứng mũi kéo dài trên 5 ngày đối với trẻ sơ sinh và 10 ngày đối với người lớn và trẻ em. Trong trường hợp mũi bị kích ứng, tình trạng ngứa tạm thời có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng. Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em và không sử dụng khi chai không còn nguyên vẹn.

PHYSIOMER® là một chế phẩm y tế CE 0459 phù hợp tiêu chuẩn Quy định 93/42 của Cộng Đồng Châu Âu

Nhà sản xuất
Laboratoire de la Mer Sas
F-35400 SAINT-MALO / FRANCE
<http://www.physiomer.com>

STERILE A

Rev 4.0[07.05.2018]