



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM HỘP ĐỰNG KIM PHẪU THUẬT

### A> Mô tả sản phẩm :

Hộp đựng kim phẫu thuật được sử dụng chủ yếu trong các phòng mổ nhằm mục đích kiểm soát tốt số lượng và chủng loại kim đã sử dụng trong 1 ca phẫu thuật.

### B> Thông tin sản phẩm :

Mã SP	Tên SP	Thông Số Kỹ Thuật	Hình Ảnh
VD-17	Hộp đựng kim phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vật liệu : được làm từ PS nguyên sinh hoặc giấy</li><li>- Kích thước (DxRxC): 29 x 7 x 4 cm</li><li>- Gồm 2 khay: khay thứ nhất chứa mouse mềm để ghim cố định dao &amp; kim phẫu thuật được an toàn hơn, khay thứ hai được chia thành 6 ô nhỏ đạt chiều cao thích hợp, có thể dựng đứng các vỏ bao bì của dao &amp; chỉ phẫu thuật, giúp dễ quan sát &amp; quản lý các chủng loại sản phẩm hiệu quả hơn</li></ul>	



### C> Hướng dẫn sử dụng sản phẩm :

- Bước 1 : Lấy hộp đựng kim ra khỏi bao bì đóng gói và đặt lên bàn dụng cụ phòng mổ.
- Bước 2 : Xếp từng loại kim, dao đốt sẽ sử dụng trong mỗi ca phẫu thuật vào đúng các ô đã được chia sẵn trên hộp.
- Bước 3 : Lấy từng loại kim, dao đốt sử dụng theo yêu cầu trong ca phẫu thuật
- Bước 4: Kim, dao đốt sau khi sử dụng được ghim trên nút theo thứ tự.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM HỘP ĐỰNG KIM PHẪU THUẬT

**D> Cảnh báo và thận trọng :** Chỉ sử dụng 1 lần duy nhất, không được dùng đi dùng lại nhiều lần.

**E> Thông tin lưu ý đối với sản phẩm :**

- Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, không có hóa chất, bụi làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm.
- Bao bì sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách trước khi mở sản phẩm ra sử dụng.
- Đảm bảo sản phẩm phải còn hạn sử dụng trong khi xài.
- Chỉ sử dụng một lần duy nhất (không được xài đi xài lại nhiều lần).

