

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
CỐC NGUYỆT SAN

1. THÀNH PHẦN

- 100% Silicon Y tế nhập khẩu từ Warker Silicone của Đức

2. CÔNG DỤNG

- Là sản phẩm thay thế băng vệ sinh và tampon cho phụ nữ, được cho vào vùng kín để hứng lấy kinh nguyệt trong những ngày đèn đỏ.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tiệt trùng Cốc và rửa sạch tay.

2. Gấp Cốc theo hướng dẫn và giữ chặt cốc ở trạng thái gấp.

2. Ngồi xổm ở tư thế thoải mái nhất.

3. Hướng miệng Cốc về phía xương cụt và từ từ đưa cốc vào trong.

4. Thả tay khi Cốc đã nằm khoảng 2/3 ở bên trong, cốc sẽ tự bung mở và các “giác hút” ở miệng cốc sẽ giúp cốc bám chặt vào thành âm đạo.

5. Dùng 1 ngón tay để kiểm tra quanh bầu cốc xem còn nếp gấp quanh cốc không, đồng thời thử xoay nhẹ cốc, nếu không thể xoay cốc hoặc chỉ có thể xoay nhẹ thì cốc đã bung mở và nằm đúng vị trí và ngược lại.

4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

- Nên đo cổ tử cung trước khi sử dụng cốc nguyệt san để xác định tử cung ngả trước hay ngả sau, cao hay thấp để chọn size cốc và sử dụng cốc phù hợp.

- Thay cốc nguyệt san ít nhất 2 lần/ngày và không sử dụng cốc quá 12 tiếng/lần.

- Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng cốc nguyệt san nếu bạn đang gặp các vấn đề phụ khoa.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Sử dụng vào các mục đích khác ngoài việc thay thế cho Băng vệ sinh

6. BẢO QUẢN

Rửa BeU Cup bằng bằng dung dịch rửa cốc nguyệt san BeU Mate hoặc nước nóng để tiệt trùng trước và sau khi sử dụng. Lưu ý vệ sinh thật kỹ 04 lỗ thoát khí trên miệng cốc để tránh bí tắc và đảm bảo các “giác hút” hoạt động bình thường.

Không sử dụng các loại xà bông hoặc dung dịch vệ sinh có chứa dầu để vệ sinh cốc bởi dầu sẽ ăn mòn bề mặt cốc

Sau khi hết chu kỳ, bảo quản cốc trong hộp thoáng khí hoặc túi sạch

7. HẠN DÙNG

Sử dụng trong thời gian 5 năm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

