

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Chúng tôi, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH**

Địa chỉ: 65 đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Sản phẩm khẩu trang y tế Sử dụng để chống lại các loại vi khuẩn và khói bụi từ môi trường xâm nhập vào hệ hô hấp con người,
- Cách sử dụng:
  - Kéo 2 đầu dây khẩu trang qua hai bên vành tai.
  - Điều chỉnh nẹp mũi âm vừa khít với sống mũi
  - Kéo mép dưới khẩu trang qua cằm
  - Dùng khẩu trang không nên để lẫn mặt trong, nhất là khi tiếp xúc với bụi hóa chất độc hại
  - Luôn bỏ khẩu trang trong bao để giữ sạch khẩu trang khi không sử dụng

