


Intelli Wrap

Vòng bít dùng cho máy đo huyết áp HEM-FL31-B

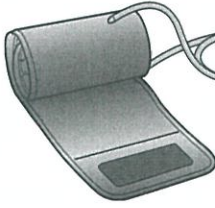

Phiên bản:
HEM-FL31-BLA
xxxxxxx-xA

All for Healthcare

Giới thiệu



Cảm ơn bạn đã mua OMRON Intelli Wrap (HEM-FL31-B). Chu vi cho vòng bít này là 22 đến 42 cm.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp OMRON trước khi sử dụng.

Giữ lại để tham khảo trong tương lai. Để biết thông tin cụ thể về huyết áp của chính bạn, HÃY THAM KHẢO CHUYÊN GIA Y TẾ CỦA BẠN.

OMRON HEM-FL31-B đi kèm với các thành phần sau:

Vòng bít

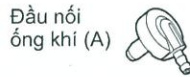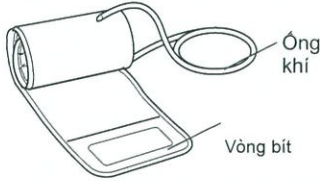

Thông tin an toàn quan trọng

⚠ Cảnh báo Chỉ ra một tình huống có khả năng nguy hiểm, nếu không tránh, có thể gây ra tử vong hay chấn thương nghiêm trọng

- Để tránh bị siết cổ, hãy để ống khí tránh xa trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ.
- Để các thành phần xa tầm tay trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi hoặc trẻ em. Sản phẩm này chứa các bộ phận nhỏ có thể gây nguy hiểm nghẹt thở cho trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ em nếu nuốt phải.

Chỉ ra một tình huống có khả năng nguy hiểm, nếu không tránh, có thể gây ra chấn thương nhẹ hay trung bình cho người sử dụng hay bệnh nhân, hay gây hư tổn cho thiết bị hay tài sản khác.

⚠ Thận trọng người sử dụng hay bệnh nhân, hay gây hư tổn cho thiết bị hay tài sản khác.


- Vòng bít OMRON này có thể được kết nối với nhiều Máy đo huyết áp OMRON khác nhau. Vòng bít này chỉ hoạt động với Máy đo huyết áp OMRON tương thích với HEM-FL31 hoặc HEM-FL31-B, như đã lưu ý trên nhãn dán vòng bít bên cạnh giắc cắm ống khí.
- Cởi bỏ quần áo bó sát và dây ra khỏi cánh tay của bạn trong khi đo.
- CHỈ sử dụng vòng bít tay trên những người có chu vi cánh tay nằm trong phạm vi cụ thể của vòng bít.
- KHÔNG làm bẻ cong vòng bít hoặc ống khí quá mức.
- KHÔNG gấp hoặc xoắn ống khí trong khi đo. Điều này có thể gây thương tích do gián đoạn sự lưu thông máu.
- Để rút đầu nối ống khí, hãy rút đầu nối ống khí bằng nhựa ở để ống chứ không phải ống.

Hướng dẫn sử dụng

1. Kết nối đầu nối ống khí với ống khí một cách chính xác.


Lưu ý:

Sử dụng sai đầu nối có thể gây rò rỉ không khí và dẫn đến kết quả đo sai.

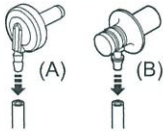


2. Cắm vòng bít vào máy đo huyết áp của bạn bằng cách cắm chặt vào đầu nối ống khí.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng đầu nối ống khí (B), hãy đảm bảo cắm nó vào giắc ống khí cho đến khi có âm thanh click.

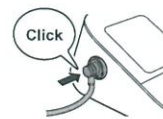

3. Quấn vòng bít vào cánh tay trên bên trái của bạn. Cạnh dưới của vòng tay phải là 1 đến 2 cm, khuỷu tay bên trong. Ống khí nằm ở bên trong cánh tay của bạn và thẳng hàng với ngón giữa của bạn.

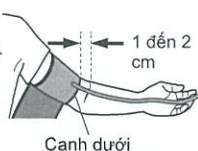

4. Hãy chắc chắn rằng ống khí được đặt ở bên trong cánh tay của bạn và quần vòng bít an toàn để nó không thể di chuyển xung quanh cánh tay của bạn.



Đo huyết áp trên cánh tay phải

Ống khí nên chạy dọc theo một bên khuỷu tay của bạn, dọc theo phía dưới cánh tay của bạn. Cần thận không để ống tay của bạn đè lên ống khí.



Lưu ý: Huyết áp có thể khác nhau giữa cánh tay phải và cánh tay trái, và chỉ số huyết áp đo được có thể khác nhau. OMRON khuyến nghị luôn luôn sử dụng cùng một cánh tay để đo. Nếu kết quả giữa hai cánh tay khác nhau đáng kể, hãy kiểm tra với bác sĩ của bạn để xác định cánh tay nào sẽ sử dụng cho các phép đo của bạn.

Bảo trì

- Không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dễ bay hơi.
- Sử dụng một miếng vải khô mềm hoặc một miếng vải mềm được làm ẩm bằng chất tẩy nhẹ (trung tính) để làm sạch vòng bít và sau đó lau bằng vải khô.
- Không rửa hoặc ngâm vòng bít tay trong nước.
- Không sử dụng xăng, chất pha loãng hoặc dung môi tương tự để làm sạch vòng bít.
- Không cất vòng bít ở những nơi tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ ẩm, ánh sáng mặt trời trực tiếp, bụi hoặc hơi ăn mòn như thuốc tẩy.

Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm	Vòng bít dùng cho máy đo huyết áp
Model	Intelli Wrap HEM-FL31-B
Chu vi vòng bít	22 đến 42 cm
Kích thước	Khoảng 145 mm × 532 mm (ống khí: 750 mm)
Điều kiện vận hành	+10 °C đến +40 °C / 15 đến 90 % RH (không ngưng tụ) / 800 đến 1060 hPa
Điều kiện bảo quản / vận chuyển	-20°C đến +60°C / 10 đến 90% RH (không ngưng tụ)
Độ bền (Tuổi thọ sản phẩm)	5 năm
Các bộ phận	1 vòng bít Intelli Wrap 1 hướng dẫn sử dụng 2 đầu nối ống khí thay thế

- Vòng bít này không được làm từ cao su thiên nhiên.

Giải thích biểu tượng

ART. / ○	Đánh dấu động mạch		Cần tham khảo sách hướng dẫn sử dụng
LATEX FREE	Không được sản xuất từ cao su thiên nhiên		Chỉ thị nhà sản xuất thiết bị y tế
	Nhận diện tính tương thích vòng bít của thiết bị		Arm circumference

Bảo hành giới hạn

Vòng bít HEM-FL31-B được bảo đảm không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề phát sinh trong thời hạn bảo hành 1 năm kể từ ngày mua, khi được sử dụng đúng theo các hướng dẫn được cung cấp với vòng bít của bạn.

Bảo hành trên chỉ dành cho người mua bán lẻ ban đầu. Chúng tôi có quyền tùy chọn thay thế mà không tính phí đối với bất kỳ vòng bít nào được bảo hành theo quy định trên. Thay thế là trách nhiệm duy nhất của chúng tôi và biện pháp khắc phục duy nhất của bạn theo bảo hành trên. Để có được dịch vụ bảo hành, hãy liên hệ với nhà phân phối ủy quyền của OMRON tại quốc gia của bạn.

ĐÂY LÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DUY NHẤT ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI OMRON ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NÀY, VÀ OMRON SAU ĐÂY MIỄN TRỪ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO KHÁC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM BẢO HÀNH ĐƯỢC NGỤ Ý VÌ MỘT MỤC ĐÍCH NÀO ĐÓ KHÁC. BẢO HÀNH NGỤ Ý VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HẠOI LUẬT PHÁP, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG THỜI GIAN BẢO HÀNH NẾU TRÊN. OMRON KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MẮT HOẶC CHI PHÍ HOẶC THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, NGẦM NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM.

Bảo hành này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn có thể có các quyền khác thay đổi theo thẩm quyền. Do các yêu cầu đặc biệt của địa phương, một số hạn chế và loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

ĐỂ LIÊN HỆ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI PUERTO RICO, GỌI 1-800-634-4350. ĐỂ LIÊN HỆ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC QUỐC GIA KHÁC, LIÊN HỆ VỚI NHÀ PHÂN PHỐI ĐỊA PHƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP www.omronhealthcare.la

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày... Tháng... Năm 2020.

Bảo hành dành riêng cho thị trường Mexico

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TẠI MEXICO BỞI: OMRON HEALTHCARE MEXICO, S.A. DE C.V. BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169, PISO 1, COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520, THÀNH PHỐ MEXICO, MEXICO. ĐIỆN THOẠI 800-277-2509. OMRON HEALTHCARE MEXICO, S.A. DE C.V. bảo hành VÒNG BÍT DÀNH CHO MÁY ĐO HUYẾT ÁP, Model: HEM-FL31-B đối với mọi khiếm khuyết trong sản xuất và vận hành, không tính thêm chi phí cho người tiêu dùng, trong khoảng thời gian 1 (một) năm kể từ ngày mua, miễn là sản phẩm được sử dụng theo hướng dẫn được cung cấp. Các bảo hành được mô tả trên chấp dụng cho người mua bán lẻ.

Bảo hành này bao gồm tất cả các bộ phận và thành phần của sản phẩm và bao gồm cả chi phí nhân công. Chúng cũng bao gồm các chi phí vận chuyển của sản phẩm trong mạng lưới dịch vụ phát sinh từ việc tuân thủ chính sách bảo hành này.

Để đảm bảo hiệu quả này, chúng tôi có thể không yêu cầu gì khác ngoài việc xuất trình sản phẩm, kèm theo chính sách này được đóng dấu hợp lệ bởi người bán cho biết ngày bán của sản phẩm hoặc hóa đơn (hoặc vé bán hàng trong trường hợp mua). Để nhận dịch vụ bảo hành hoặc các dịch vụ xác nhận bảo hành tiếp theo, bảo hành hợp lệ hoặc để có được các bộ phận, linh kiện, vật tư tiêu hao và phụ kiện, hoặc để xác nhận và bảo trì ngoài thời hạn bảo hành của sản phẩm, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng của OMRON HEALTHCARE México SA CV, gọi điện thoại miễn phí, theo số 800-277-2509 trong giờ làm việc từ 11:00 đến 14:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hoặc đến BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169, PISO 1, COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL, MEXICO CITY, MEXICO trong cùng giờ mở cửa. Công ty, theo quyết định của mình và dựa trên phân tích của mình, trong trường hợp phải bảo hành, thì sản phẩm sẽ được thay thế bằng một sản phẩm khác mà không tính phí.

Chúng tôi nhắc nhở bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để vận hành chính xác sản phẩm. Trước khi yêu cầu trợ giúp, vui lòng tham khảo phần Hướng dẫn khắc phục sự cố trong hướng dẫn của bạn.

Bảo hành này KHÔNG thể có hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Khi sản phẩm đã được sử dụng trong các điều kiện khác hơn bình thường
- Khi sản phẩm không được vận hành theo các hướng dẫn đi kèm
- Khi sản phẩm đã bị thay đổi hoặc sửa chữa bởi những người không được ủy quyền bởi OMRON HEALTHCARE MEXICO, S.A. DE C.V.

Bảo hành này được cấp và không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ bảo hành nào khác được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

MÔ TẢ SẢN PHẨM: : VÒNG BÍT DÀNH CHO MÁY ĐO HUYẾT ÁP BẮP TAY

THƯƠNG HIỆU OMRON OMRON, MODEL: HEM-FL31-B

SỐ SERIAL: _____

KHÁCH HÀNG: _____

NGÀY MUA HÀNG: _____

HÃY NHỚ BẢO QUẢN VÉ MUA CỦA BẠN HOẶC HÓA ĐƠN MUA THIẾT BỊ

 **OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.**
Kyoto, 617-0002 JAPAN

Phân phối bởi:
OMRON HEALTHCARE, INC.
Illinois, U.S.A.
www.omronhealthcare.la

Sản xuất bởi:
OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
No. 28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong
Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnam

© 2020 OMRON HEALTHCARE, INC.

Made in Vietnam

IM-HEM-FL31-BLA-01-01/2020