

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

### GEL SIÊU ÂM – DR SÁNG

1. **GEL SIÊU ÂM – DR SÁNG** thuộc dạng phân tán trong nước được dùng phổ biến trong chuẩn đoán siêu âm y khoa, với các thành phần: Carbopol, Glycerin, Polyethylene Glycol 100, Natri hydroxid, Nước tinh khiết.
2. **CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:**
  - Gel được sử dụng trong quá trình siêu âm, làm loại bỏ không khí giữa bề mặt da và máy thăm dò từ đó cho phép sóng siêu âm tiếp cận vào cơ thể một cách rõ ràng hơn và không bị gián đoạn.
3. **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**
  - Bôi gel trực tiếp lên da khi tiến hành siêu âm chuẩn đoán với máy siêu âm.
  - Lau sạch bằng khăn hoặc giấy mềm sau khi sử dụng.
4. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**
  - Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.
5. **CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:**
  - Không được uống.
  - Để xa tầm tay trẻ em.
  - Chỉ sử dụng bên ngoài.
  - Không sử dụng với máy khử rung tim. Không thủ tục xâm lấn hoặc ứng dụng sinh thiết.
6. **ĐÓNG CHAI VÀ ĐÓNG GÓI**
  - Sản phẩm được đóng trong: Chai 500ml, chai 1 lít, can 2,5 lít, can 5 lít.
7. **BẢO QUẢN:**
  - Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
  - Sau khi sử dụng đậy nắp kín.
8. **HẠN DÙNG**
  - 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
9. **VẬN CHUYỂN**
  - Phương tiện vận chuyển sản phẩm phải khô, sạch, được che mưa nắng, không có chất độc hại và không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Bình Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc



Phạm Văn Dũng