

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

HINZUCAR

1. THÀNH PHẦN

- Thành phần: Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Centella Asiatica Extract (dịch chiết rau má), Tocopheryl Acetate, Nano bạc, Nước tinh khiết, Glycosaminoglycans.
- Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

2. CÔNG DỤNG

- Bôi ngoài da tạo một rào chắn với chức năng làm cô đọng để làm lành ban đầu vết thương, cải thiện làm mờ vết sẹo cũ, sẹo lồi... làm mờ vết nhăn và vết thâm do mụn trứng cá, côn trùng đốt.
- Hỗ trợ ngừa sẹo mới do tai nạn, xây xát, phẫu thuật, bỏng...
- Giữ ẩm cho da hết nứt nẻ, cải thiện vết chai sần, khô nứt gót.

3. CÁCH DÙNG

- Sau khi làm sạch vùng da cần sử dụng, vỗ nhẹ và làm khô da, bôi một lượng cỡ hạt đậu vào đầu sẹo và nhẹ nhàng trải rộng thành lớp mỏng trên toàn bộ vùng da này theo một hướng. Không cần xoa vào da.
- Để khô khoảng 1 – 2 phút. Một khi đã khô, bạn có thể che chắn vùng da này bằng cách trang điểm hoặc dùng kem chống nắng nếu cần.
- Bôi sản phẩm tối thiểu 2 lần/ ngày.
- Để bảo vệ da, chống lại sự hình thành sẹo, nên sử dụng sản phẩm một khi vết thương đã đóng kín.

4. CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

- Để xa tầm tay trẻ em
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng được in trên bao bì.
- Không nên dùng sản phẩm cho vết thương hở hoặc còn ướt.
- Không nên để sản phẩm dính vào màng nhầy, niêm mạc hoặc bôi quá gần mắt, tra mắt.
- Không nên dùng sản phẩm để bôi da đồng thời cùng các chế phẩm khác mà không có ý kiến của bác sỹ.



5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

6. BẢO QUẢN

- Bảo quản ở nhiệt độ thường, để nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em.

7. HẠN SỬ DỤNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

Địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3553326

PHÊ DUYỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ENLIE
Phạm Văn Dũng

63-C.T.C.P
DUONG