

*Ngày 19 tháng 03 năm 2020*

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
DUNG DỊCH XÔNG RỬA, LÀM SẠCH TAI, MŨI, HỌNG  
AN XOANG**

**THÀNH PHẦN:**

Dược liệu chiết xuất cho 1ml:

Tam thất ( Panax Pseudo – ginseng ).....2 gam

Cúc hoa vàng ( Chrysanthemum indicum )..2 gam

Kim ngân hoa ( Lonicera japonica.Thum )...2 gam

Bạc hà ( Mentha arvensis L ).....0,5 gam

Nước, rượu vừa đủ..... 1 ml

**CÔNG DỤNG**

Vệ sinh, làm sạch Tai, Mũi, Họng.

Hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng, cảm cúm, viêm tai giữa, viêm họng.

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG**

Dùng cho trẻ từ 1 tháng tuổi trở lên và người lớn

Giúp bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

**CÁCH DÙNG**

**Tai:** Hỗ trợ điều trị: viêm tai giữa, viêm màng sụn, dị ứng, nấm tai, ngứa, sung, đau, mụn, mưng mủ, chảy mủ.

\* **Cách sử dụng:** Thấm dung dịch vào bông, vắt hơi kiệt ( còn hơi ẩm ), vệ sinh vành tai (phần bên ngoài màng nhĩ ).

**Mũi, Họng:** Hỗ trợ điều trị: cúm, viêm mũi, viêm xoang, viêm xoang cấp, viêm mũi dị ứng, ngứa, sung, đau, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi.

Hỗ trợ điều trị: viêm họng, ngứa, họng hạt, ho do dị ứng, mắc đờm, u...

\* **Cách sử dụng:** Nằm yên, ngửa mặt lên, xịt, nhỏ vào bên cạnh cánh mũi, mỗi bên 1 giọt. Mỗi bên mũi, nhỏ, xịt cách nhau 3 phút.

\* Mỗi ngày có thể xịt, nhỏ 2, 3 lần nước sôi để nguội, nước cất. để hỗ trợ cho tạt chất đẩy ra.

**Chú ý:** Lấy bông thấm nước sôi để nguội, vắt hơi kiệt, vệ sinh tạt chất trong mũi, tai.

**Liệu trình sử dụng:**

\* Dùng vệ sinh thường xuyên mỗi ngày 1 lần.

\* Bị các bệnh tai, mũi, họng.

- Dùng 3 đến 5 lần / ngày

- Dùng tới khi Mũi, Họng sạch, thông thoáng.

- Sau đó dùng thường xuyên mỗi ngày 1 lần.

**Khi dùng:** Lấy một lượng dung dịch vừa phải.

Pha thêm tỷ lệ nước sôi để nguội hoặc nước cất.

+ Để tủ lạnh ngăn mát dùng được 2 đến 3 ngày.

+ Không để trong tủ lạnh ngăn mát chỉ để được 8 giờ

- Khi pha để tủ lạnh ngăn mát, lúc dùng lấy ra để hết lạnh mới dùng.

\* Từ 1 tháng tuổi đến 5 tháng tuổi : 1ml dung dịch + 8 ml nước.

\* Từ 6 tháng tuổi đến 15 tháng tuổi : 1ml dung dịch + 7 ml nước.

\* Từ 16 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi : 1 ml dung dịch + 6 ml nước.

\* Từ 3 tuổi đến 6 tuổi : 1ml dung dịch + 5 ml nước.

\* Từ 7 tuổi đến 10 tuổi : 1ml dung dịch + 4 ml nước.

\* Từ 11 tuổi đến 17 tuổi : 1 ml dung dịch + 3 ml nước.

\* Từ 18 tuổi trở lên : 1 ml dung dịch + 2 ml nước

(18 tuổi trở lên có thể dùng thẳng, không pha thêm nước).

**Đặc điểm khi sử dụng:**

- Ra nhiều tạt chất ở lỗ mũi, ( lấy bông thấm nước sôi để nguội, vắt hơi kiệt, vệ sinh tạt chất trong mũi, tai )

- Người lớn dùng sau 3 - 5 ngày, tạt chất được thải ra đường họng và mũi.

sẽ gây kích ứng, tức, ngứa họng.

- Khẽ khạc nhẹ, xì mũi hỗ trợ cho tạt chất thải ra.

**Lưu ý:**

- Không dùng chông chéo sản phẩm khác.
- Chuẩn bị giấy lau, rồi bỏ vào thùng rác.
  - Để xa tầm tay trẻ em.

**CHÔNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho trường hợp mắc cảm với các thành phần của sản phẩm, chóng mặt, buồn nôn, choáng váng ...

**CẢNH BÁO THẬN TRỌNG**

Không được uống, để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

**BẢO QUẢN**

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**Sản phẩm của:**

**CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN.**

Địa chỉ: Số 96 C, ngõ 445, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**Sản xuất bởi : CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM BIMEX TẠI BẮC NINH**

**Địa chỉ:** Khu phố Cao Lâm, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

*Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020*

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

*Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)*



*Khuy*

**GIÁM ĐỐC  
VŨ HẢI YẾN**