

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ

1. Thông tin cấu trúc sản phẩm
  - Có nhiều lớp, có gấp nếp dạng mồm.
  - Lớp vi lọc
  - Lớp vải lọc tấm chất nano- bạc
  - Thanh nẹp mũi
  - Đệm mũi, dây đeo, viền
2. Kiểu dáng, kích thước
  - Kích thước: Chiều dài 17,5 cm; chiều rộng 9,5cm
  - Đảm bảo che kín mũi, miệng
3. Cách sử dụng
  - Khẩu trang có 2 mặt, đeo mặt màu trắng vào trong (mặt trắng tiếp xúc với miệng, mũi), mặt có màu sắc khác nằm phía ngoài. Sau khi mắc 2 dây chun quàng vào tai, kéo nhẹ cạnh dưới xuống quá cằm một chút, cạnh trên có thanh nẹp thì bóp thanh nẹp sao cho ôm khít sống mũi. Dùng ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ hai bên khẩu trang để ôm khít 2 má.
  - Khẩu trang chỉ nên sử dụng một lần hoặc tối đa một ngày.
  - Khi tháo bỏ không vứt bừa bãi mà phải mang vào thùng rác theo quy định để tránh vi khuẩn có cơ hội phát triển.
4. Quy cách đóng gói
  - 50 chiếc/túi nylon/ hộp giấy
5. Hạn Sử dụng
  - Ghi trên bao bì
6. Bảo quản
  - Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5<sup>0</sup>C đến 40<sup>0</sup>C
7. Đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm :  
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG MINH

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIAM ĐỐC

Phạm Đức Anh