

# **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO VÀ TRỘN MẪU**

## **MODEL : Macro-Cuvette + Balls và Micro-Cuvettes (Dispo System With Integral Mixer)**

### **Cách sử dụng như sau:**

- 1/ bật nguồn thiết bị (ON)
- 2/ chọn xét nghiệm cần thực hiện
- 3/ cho 200uL huyết tương vào trong cuvettes + Balls
- 4/ Ủ dụng cụ trên bộ ủ 37<sup>0</sup>C của thiết bị
- 5/ thao tác theo quy trình trong từng xét nghiệm: PT; APTT; TT; FIB
- 6/ đợi máy trả kết quả ra màn hình
- 7/ cuối ngày vệ sinh máy và tắt máy

## **CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG MÁY VÀ LÀM XÉT NGHIỆM**

### **1. Khi bật, tắt máy:**

- Khi mất điện cần phải tắt máy ngay, đến khi bắt đầu có điện nên để nguồn điện ổn định từ 3 đến 5 phút ta mới bật máy. Nên dùng ổn áp để có điện áp ổn định.
- Chú ý không bật máy luôn sau khi vừa tắt máy. Sau ít nhất 30 giây để máy ổn định mới bật. Nếu bật, tắt đột ngột có thể gây cháy cầu chì và sẽ dẫn đến hỏng các bộ phận khác của máy.